

beurer

MP 70



CZ Parafínová lázeň
Návod k použití

Obsah

1. Obsah balení	2	8. Čištění	7
2. Bezpečnostní pokyny	3	9. Náhradní díly a díly podléhající opotřebením	8
3. K seznámení	4	10. Likvidace	8
4. Použití v souladu s určením	5	11. Technické údaje	8
5. Popis přístroje	5		
6. Uvedení do provozu	5		
7. Obsluha	6		

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem

Váš tým Beurer

1. Obsah balení

- 1 parafínová lázeň MP 70
- 1 víko
- 1 ochranná mřížka
- 2 sáčky s 450 g parafínového vosku
- 30 plastových rukavic / plastové sáčky / plastové fólie / fólie







Výstraha

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.

2. Bezpečnostní pokyny

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a příslušenství jsou použity následující symboly:

 Výstraha	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
 Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.
	Značka CE potvrzuje, že výrobek odpovídá požadavkům, které Evropské společenství klade na výrobce.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá tak třídě ochrany 2.

Důležitá bezpečnostní upozornění před použitím přístroje

Výstraha

- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím. Tento přístroj není určen pro použití v komerčním prostředí nebo zdravotnickém zařízení. Přístroj používejte jen pro soukromé domácí účely.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis, protože pro opravy jsou zapotřebí speciální nástroje, popř. speciální díly. V opačném případě nárok na záruku zaniká.
- Nepoužívejte přístroj v těchto případech: srdeční onemocnění, zarudnutí kůže, záněty, otoky, přecitlivělost některých míst, cukrovka, poranění, popáleniny, ekzém, lupenka nebo snížené vnímání bolesti.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže jste necitliví na teplo.
- V těhotenství nebo při zdravotních problémech konzultujte použití přístroje se svým lékařem.
- Jestliže trpíte akutními záněty nebo periferní vaskulární chorobou, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Nikdy parafínovou lázeň nepoužívejte bez parafínového vosku!
- Před každým použitím odložte šperky z rukou a nohou.
- Parafínový vosk nikdy nerozehřívejte v plastovém obalu! Parafínový vosk nikdy nerozehřívejte nad sporákem, otevřeným ohněm nebo v mikrovlnné troubě! Parafínový vosk rozehřívejte výhradně v parafínové lázni!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při používání elektrických přístrojů. Postarejte se o to, aby děti nepoužívaly přístroj bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Před zapojením přístroje do sítě zkontrolujte, zda místní napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody (např. vana, umyvadlo atd.).
- Nepoužívejte přístroj během koupání, sprchování nebo ve spánku.
- Nevkládejte přístroj do vody nebo do jiných kapalin. Přístroj ukládejte na bezpečné místo.

- Nepokládejte přístroj na plochy citlivé na teplo!
- Při používání přístroje dbejte na to, aby bezpečně stál na pevném a rovném podkladu.
- Přístroj a síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy. Přístroj nestavte na jiné přístroje. Mohlo by dojít k jejich poškození na základě horkého parafinového vosku.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti aerosolových produktů a přístrojů, kterými se aplikuje kyslík.
- Přístroj nepoužívejte venku. Přístroj používejte výlučně ve vnitřních prostorech.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Přístroj nepoužívejte v posteli, ve spánku nebo jste-li unaveni.
- Nepoužívejte přístroj pod dekou, ručníkem atd.
- Přístroj používejte pouze s dodávaným příslušenstvím.
- Nepřepínajte parafinovou lázeň! Dbejte na to, aby rozpuštěný parafinový vosk nepřesáhl přes značku MAX.
- Když se parafinový vosk úplně rozpustí, může být velmi horký.
- Než ponoříte ruce, nohy nebo lokty do rozpuštěného parafinového vosku, zkontrolujte nejdříve na vnitřní straně zápěstí, zda je teplota vosku příjemná.

Důležitá bezpečnostní upozornění během používání přístroje



Výstraha

- Pokud se během používání vyskytne závada, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Chraňte oči a jiné citlivé části těla před horkým parafinovým voskem.
- Jestliže na kůži pociťujete, že je parafinový vosk dlouho příliš horký nebo příliš studený, může se jednat o tělesný problém. V takovém případě se poraďte s lékařem.
- Dbejte na to, aby byl během používání přístroj naplněn parafinovým voskem vždy minimálně ke značce MIN.
- Nemějte parafinový vosk na ošetřovaném místě déle než 20 minut.
- Během používání přístrojem netřeste ani nehýbejte. Mohli byste se opařit nebo popálit.
- Jestliže je v parafinové lázni horký parafinový vosk, nepřilívejte žádnou vodu.
- Přerušete aplikaci, jestliže budete pociťovat bolesti, podráždění pokožky, objeví se zánět kůže nebo se vám udělá nevolno, a poraďte se s lékařem.
- Jestliže přístroj omylem spadne do vody, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Důležitá bezpečnostní upozornění po použití přístroje



Pozor

- Po použití přístroj vypnete tak, že vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty k odstranění bloku zasklelého vosku z parafinové lázně. Mohli byste parafinovou lázeň poškodit nebo poškrábat.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, uchovávejte ho na suchém, chladném a bezprašném místě.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na náš zákaznický servis.

3. K seznámení

V parafinové lázni MP 70 se rozpouští parafinový vosk.


Do teplého tekutého parafinového vosku se na krátkou dobu několikrát za sebou vkládají suché a rozpraskané ruce, nohy nebo lokty. Kolem postiženého místa se vytvoří tenká vrstva vosku, přes které se pak natáhne plastová rukavice. Díky teplu parafinového vosku se otevrou póry v kůži a ven se dostává vlhkost. Vrstva vosku zabraňuje úniku vlhkosti. Místo toho proniká otevřenými póry hluboko do kůže a zde zůstává. Kůže je pak díky tomu velmi vláčná a hebká. Po 20 minutách působení můžete parafinový vosk stáhnout z postiženého místa. Navíc teplo parafinové lázně zajišťuje lepší prokrvení pokožky.

4. Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen pouze k používání na lidských rukou, nohou nebo loktech.
Přístroj nepoužívejte na zvířatech!



5. Popis přístroje

1. Parafínová lázeň
2. Víko
3. Zelená kontrolka provozu
4. Regulátor teploty
5. Červená kontrolka ohřívání
6. Ochranná mřížka
7. Parafínový vosk
8. Plastové rukavice

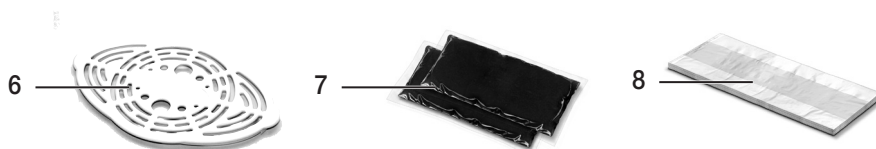

6. Uvedení do provozu

- Odstraňte obal.
- Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny díly (viz kapitola 1. Obsah balení).
- Zkontrolujte, zda parafínová lázeň a síťový kabel nejsou poškozeni.
- Postavte parafínovou lázeň na rovnou, pevnou a nenasákavou plochu nebo na stůl.
- Dbejte na to, aby byla parafínová lázeň prázdná, než do ní vložíte vosk.





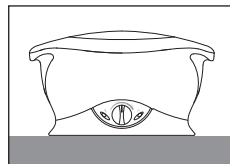
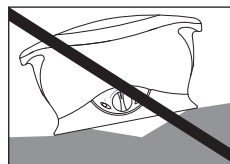


- Vyjměte parafínový vosk z plastového obalu.
- Do parafínové lázně vložte požadované množství parafínového vosku (minimálně 0,9 kg, maximálně 1,35 kg). Parafínový vosk se lépe vkládá do parafínové lázně, jestliže bloky vosku nalámete.

Pozor

Dbejte na to, aby byla parafínová lázeň před uvedením do provozu naplněna parafínovým voskem vždy alespoň ke značce „MIN“.

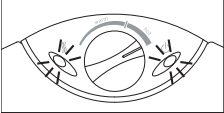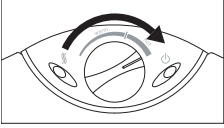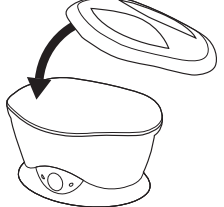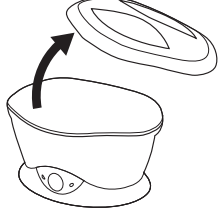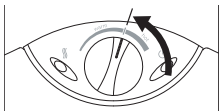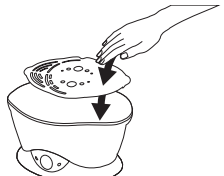

<ul style="list-style-type: none"> • Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky. (220–240V, ~50/60Hz). Na parafínové lázni se rozsvítí zelená kontrolka provozu. Přístroj je nyní zapnut. Červená kontrolka ohřívání se rovněž rozsvítí a zhasne teprve tehdy, jestliže je dosažen nastavený stupeň teploty. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Otočte regulátorem teploty do polohy „hot“, aby se parafínový vosk rozpustil. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zakryjte parafínovou lázeň víkem a počkejte, dokud se parafínový vosk úplně nerozpustí (trvá to asi 2–3 hodiny). <p>⚠ Výstraha Jestliže je parafínová lázeň nastavena do polohy „hot“, nikdy do parafínového vosku nevkládejte ruce, nohy nebo lokty!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Jakmile se parafínový vosk úplně rozpustí, sejměte víko. • Otočte regulátorem teploty na vyznačenou čárku mezi polohami „warm“ a „hot“. • Do tekutého parafínového vosku vložte ochrannou mřížku, která je součástí balení, a počkejte, dokud neklesne až ke dnu parafínové lázně. • Opět zakryjte parafínovou lázeň víkem a počkejte asi 1 hodinu, dokud se parafínový vosk neochladí na ideální teplotu pro použití (60 °C). <p>⚠ Výstraha Pokožková teplota může ovlivnit výkon přístroje a tím i teplotu vosku. Než ponoříte ruce, nohy nebo lokty do parafínového vosku, zkontrolujte nejdříve na vnitřní straně zápěstí, zda je teplota vosku příjemná. Jestliže se na povrchu vosku vytvoří tenká vrstva, zvyšte teplotu regulátorem teploty otočením doprava. Jestliže máte pocit, že je parafínový vosk příliš horký, snižte teplotu otočením regulátoru teploty doleva.</p>	  

7. Obsluha





⚠ Výstraha

Než ponoříte ruce, nohy nebo lokty do parafínového vosku, zkontrolujte nejdříve na vnitřní straně zápěstí, zda je teplota vosku příjemná.

⚠ Výstraha

Před použitím odložte šperky (např. hodinky, prsteny apod.).

Po přípravné fázi popsané v kapitole „6. Uvedení do provozu“ můžete začít s aplikací. Při používání přístroje postupujte podle tohoto popisu:

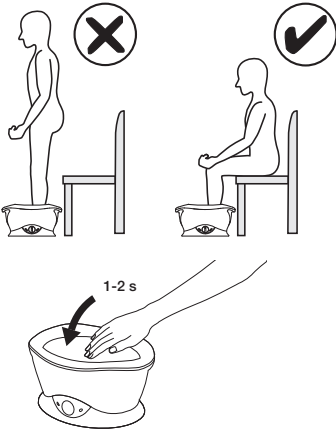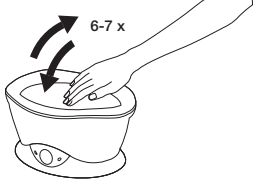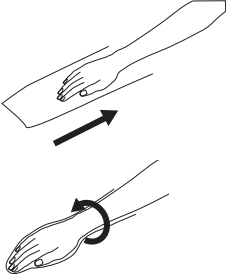
<ul style="list-style-type: none"> • Před aplikací doporučujeme nanést na ošetřovaná místa pleťový krém na ruce s obsahem lanolínu. Tím dosáhnete lepšího výsledku a po ošetření jde parafinový vosk lépe odstranit. <p>⚠ Výstraha Jestliže budete používat parafinovou lázeň na nohy, vždy u toho sedte. Nikdy si do parafinové lázně nestoupejte!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponořte ošetřovaná místa (ruku, nohu nebo loket) krátce na 1–2 sekundy do tekutého parafinového vosku. Poté ruku vyndejte a chvíli počkejte, dokud vosk neztuhne. Během této doby ošetřovaným místem nehýbejte, aby mohl vosk lépe ztuhnout. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Opakujte postup ponoření a vyndání 6 až 7krát, dokud se kolem ošetřovaného místa nevytvoří několik vrstev parafinového vosku. Jestliže vám bude parafinový vosk připadat během ošetřování příliš horký nebo příliš studený, otočte regulátorem teploty ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, abyste teplotu vosku zvýšili nebo snížili. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nyní přes ošetřované místo natáhněte plastovou rukavici, přitiskněte ji k parafinovému vosku a uzavřete ji. Plastovou rukavici nechte působit 20 minut. <p>⚠ Výstraha Jestliže budete mít plastovou rukavici na noze, nechodte s ní. Hrozí nebezpečí sesmeknutí!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Po 20 minutách stáhněte plastovou rukavici společně s vrstvou vosku z ošetřovaného místa. Plastovou rukavici zlikvidujte s domácím odpadem, nelze ji opakovaně použít. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Po každém použití vyndejte ochrannou mřížku z parafinové lázně. 	

8. Čištění

⚠ Pozor

Jestliže přístroj používá jen jedna osoba, měňte parafinový vosk v pravidelných intervalech a přitom i vyčistěte parafinovou lázeň.

Jestliže přístroj používá více osob, měl by se před ošetřením parafinový vosk z hygienických důvodů vyměnit.
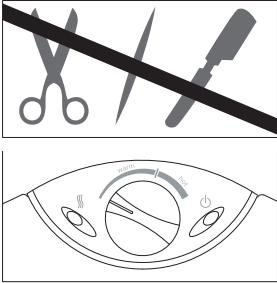
<ul style="list-style-type: none"> • Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. • Vyndejte ochrannou mřížku z parafínové lázně. • Parafínový vosk nechte přes noc ztuhnout. 	
<p>⚠ Výstraha Nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty k odstranění bloku zaschlého vosku z parafínové lázně. Mohli byste parafínovou lázeň poškodit nebo poškrábat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jestliže je parafínový vosk ztuhlý, zatlačte na konec voskového bloku a vyjměte ho z parafínové lázně. Jestliže blok vosku nejde lehce vyndat, otočte regulátorem teploty do polohy „warm“ a počkejte 10 minut. Pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte blok vosku z parafínové lázně. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Čistou utěrkou pak vytřete vnitřek parafínové lázně. <p>⚠ Pozor Při čištění nikdy nenalévejte vodu do parafínové lázně!</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Po vyčištění uschovejte parafínovou lázeň na suchém, chladném a bezprašném místě. 	

9. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Číslo výrobku nebo objednáací číslo

2x 450 g parafínového vosku + 30 plastových rukavic 589.42*

*K dostání u příslušného prodejce nebo prostřednictvím servisního střediska (podle přiloženého seznamu)

10. Likvidace

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



11. Technické údaje

Model č.	MP 70
Napájení	220–240V, ~50/60Hz
Výkon	80 W
Třída ochrany	II / □ , IPX0
Rozměry (d x š x v)	33 x 25 x 18 cm
Hmotnost	1 kg