




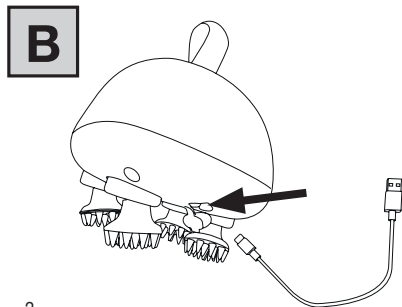

CZ	Masážní přístroj	
	Návod k použití	3
SK	Masážny prístroj	
	Návod na použitie	10

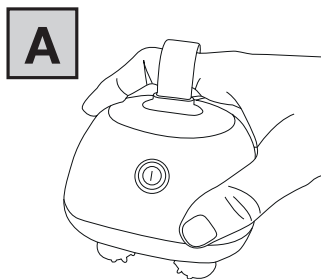

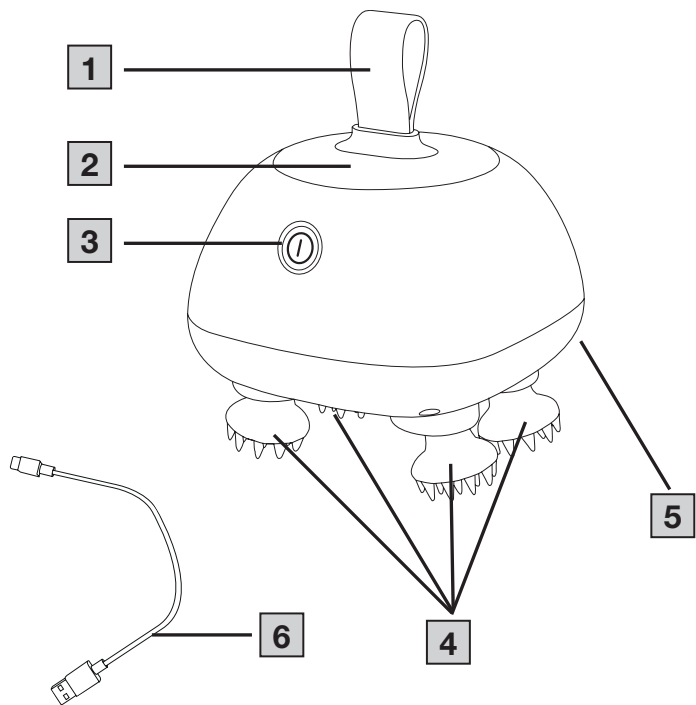

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

OBSAH

1. Obsah balení	3
2. Vysvětlení symbolů	3
3. Použití v souladu s určením	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	4
5. Popis přístroje	6
6. Použití	6
6.1 Uvedení do provozu	6
6.2 Zahájení používání	7

7. Čištění a údržba	7
8. Co dělat v případě problémů?	8
9. Likvidace	8
10. Technické údaje	9
11. Záruka	9

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství a/nebo náhradní díly nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 masážní přístroj
- 4 snímatelné masážní nástavce
- 1 nabíjecí USB kabel

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o produktu

Upozornění na důležité informace



Čtěte pokyny



Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu



Výrobce

	Značka CE Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Stejnoseměrný proud
	Přípojka USB-C
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Symbol dovozu
	Třída ochrany III

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen výhradně k masáži jednotlivých částí těla psů a koček. Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí. Přístroj NENÍ určen pro lékařské nebo komerční účely.

Nepoužívejte přístroj, pokud pro vašeho psa/kočku platí jedno či více následujících varovných upozornění. Pokud si nejste jisti, zda je tento přístroj pro vašeho psa/kočku vhodný, zeptejte se svého lékaře.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a vašeho psa/kočky.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Přístroj nepoužívejte u lidí.
- V případě poranění psa/kočky se před použitím přístroje poradte se svým veterinářem.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vy nebo váš pes/kočka trpíte kožními problémy.
- Přístroj nepoužívejte na oteklých, popálených, zanícených nebo poraněných částech těla.
- Přístroj nepoužívejte na obličeji (očích), na hrтанu a jiných zvlášť citlivých místech těla.
- Přístroj nepoužívejte k masáži v oblasti srdce.
- Používejte přístroj výhradně s masážními nástavci.
- Používejte přístroj pouze na měkkých površích vašeho psa/kočky. Nemasírujte jedno místo déle než 60 sekund v kuse.
- Riziko zmačknutí! Během použití nepřibližujte prsty k pohyblivým masážním nástavcům.
- Během použití udržujte vlasy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých masážních nástavců, aby se v nich nezachytily.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Chraňte přístroj před delším přímým slunečním zářením, extrémním horkem nebo vroucí vodou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a ošetrující produkty, které obsahují oxid hlinitý nebo silikon.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

Opravy

VAROVÁNÍ

Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. S opravami se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ

Při nesprávném používání přístroje, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru! Přístroj proto nikdy nepoužívejte bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti a nikdy ho nezakrývejte, např. dekou nebo polštářem.

Manipulace

POZOR

- Přístroj je třeba vypnout po každém použití a před každým čištěním.
- Dávejte pozor na to, aby se do přístroje nezamotaly vlasy.
- Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
- Chraňte přístroj před příliš blízkými tepelnými zdroji, jako jsou kamna nebo topná tělesa, a před přímým slunečním zářením.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby se přístroj a kabel nedostali do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami. Přístroj proto používejte pouze v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ve vaně, sauně). Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo jeho příslušenství vykazují viditelná poškození. Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.

POZOR

Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

UPOZORNĚNÍ

Pokyny pro zacházení s bateriemi

VAROVÁNÍ

- **Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí požáru!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, zlomení, výbuch nebo požár.
- K nabíjení používejte vždy správný nebo přiložený nabíjecí kabel.
- Vyvarujte se trvalého nabíjení nebo přebíjení. Po nabití nabíječku odpojte.
- Používejte pouze s příslušným síťovým adaptérem.
- Přístroj nabíjejte pod dohledem a věnujte pozornost vývoji tepla, deformaci a úniku plynu. V případě pochybností proces nabíjení přerušte.
- Vadné baterie/nabíjecí kabel/nabíječku ihned řádně zlikvidujte (viz kapitola Likvidace).
- Přístroj ani baterie nevhazujte do ohně.
- Přístroj ani baterie nikdy násilně nevybíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, nedeformujte, nekládejte do žád-

ných obalů, nepravujte ani nevystavujte nárazům.

- Nikdy nezkratujte baterie a konektory přístroje napájeného z baterií.
- Chraňte přístroj nebo baterie před přímým slunečním zářením, deštěm, teplem a vodou.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.
- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie / nabíjecí kabely / nabíječky.
- Vždy zvolte správný typ baterií. Kontaktujte zákaznický servis, abyste zjistili, zda je možné baterii vyměnit.
- Baterie vkládejte vždy správně a se zohledněním polarit (+ / -).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- **Nebezpečí spolknutí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a vašeho psa/kočky. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití může vést k těžkým vnitřním popáleninám a smrti.
- Nikdy nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dohledu dospělé osoby.

▲ POZOR

- Náhradní baterie skladujte odděleně od kovových předmětů, v dobře větraných, suchých a chladných místnostech.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah vody.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit. Po skončení životnosti baterie je nutné přístroj řádně zlikvidovat (viz kapitola Likvidace).

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1** Poutko na ruku
- 2** Kryt baterie
- 3** Vypínač
- 4** Masážní nástavce
- 5** Přípojka USB-C
- 6** Nabíjecí USB-C kabel

6. POUŽITÍ

6.1 Uvedení do provozu

Před prvním použitím přístroje musíte přístroj plně nabit, což trvá zhruba 100 minut. Plně nabitý přístroj pak pracuje cca 165 minut.

Postupujte takto:

1. Připojte nabíjecí USB-C kabel **6** do USB-C zdičky **5** a síťového adaptéru (není součástí dodávky).
2. Zastrčte síťový adaptér do vhodné zásuvky. Vypínač **3** bliká během nabíjení bíle (viz obrázky **B** na rozkládací straně 3).

UPOZORNĚNÍ

Během nabíjení nelze přístroj používat.

3. Jakmile vypínač **3** svítí trvale bíle, je baterie úplně nabitá. Po vytažení nabíjecího USB kabelu z přístroje zhasne vypínač **3**. Přístroj je nyní připraven k provozu.



Pokud je doba provozu na baterie nižší než 20 %, začne vypínač **3** blikat. V režimu „pomalé rychlosti“ začíná blikat bíle – v režimu „rychlé rychlosti“ začíná blikat modře. Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí a po 15 minutách se automaticky vypne.

6.2 Zahájení používání

1. Přístroj zapněte stisknutím vypínače **3** na 2 sekundy.
 - ↳ Vypínač **3** začne bíle blikat. Masážní nástavce začnou rotovat.
2. Přístroj je vybaven pomalým a rychlým rychlostním stupněm. Krátkým stisknutím vypínače **3** můžete přepínat mezi oběma rychlostními stupni.
 - ↳ Barva vypínače **3** indikuje aktuální rychlostní stupeň:
 - bílá = pomalá rychlost
 - modrá = rychlá rychlost
3. Nyní přiblížte svého psa/kočku pomalu k přístroji, aby si na přístroj zvykl/a a mohl/a se zbavit případných obav nebo výhrad.
4. Po chvílce zvykání přejedte přístrojem přes ošetřované místo na psovi/kočce. Používejte přístroj pouze na měkkých plochách vašeho psa/kočky. Nemasírujte jedno místo déle než 60 sekund v kuse.

⚠ POZOR

Pokud by pes/kočka vykazoval/a známky nepříjemných pocitů nebo nevolnosti, okamžitě aplikaci přerušete.

5. Přístroj po každém použití vypněte. Přístroj vypněte stisknutím vypínače **3** na 2 sekundy.
 - ↳ Vypínač **3** zhasne. Masážní nástavce se již neotáčejí.
6. Po každém použití uchovávejte přístroj v originálním obalu. Přístroj nenechávejte ležet bez obalu.

⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění masážních nástavců

UPOZORNĚNÍ

Masážní nástavce **4** čistíte výhradně ručně. Masážní nástavce NEMYJTE v myčce na nádobí nebo v pračce.

Masážní nástavce **4** po každém použití vyčistěte takto:

1. Rukou odšroubujte čtyři masážní nástavce **4** z přístroje.
2. Masážní nástavce vyčistěte pod tekoucí vodou.
3. Nechte masážní nástavce úplně uschnout.
4. Našroubujte čtyři zcela vysušené masážní nástavce zpět na přístroj.

Čištění přístroje

- Přístroj nikdy nečistěte čisticími prostředky, které obsahují alkohol, benzin nebo aceton. Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Přístroj můžete čistit jemným, lehce navlhčeným hadříkem. Přístroj opět použijte, až bude úplně suchý.

⚠ POZOR

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se to stalo, použijte přístroj až tehdy, když bude úplně suchý.

Uložení

Přístroj po použití vždy skladujte v originálním obalu a bez zatížení. Přístroj vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

8. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMU?

Problém	Odstranění
Přístroj nelze zapnout	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně dlouho a pevně vypínač. Nabijte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.

9. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



Ekologická likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme jednotlivé součásti, zejména baterie, likvidovat odděleně.


1.

Pro otevření krytu přihrádky na baterie **2** uchopte kryt rukama a otočte jím ve směru hodinových ručiček.




2.

Po otevření krytu přihrádky na baterie byste měli vidět červeno-černý kabel a (bílý) konektor, kterým je zařízení napájeno z akumulátoru/baterie.

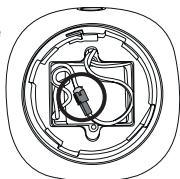


3.

Rozpojte konektor. Pokud nevidíte bílý konektor, je možné, že během provozu sklouzl do krytu přístroje.

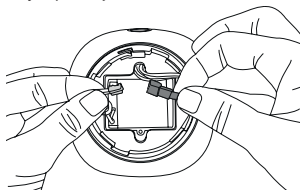

4.

Vytáhněte baterii z přístroje. Všechny součásti odborně zlikvidujte.

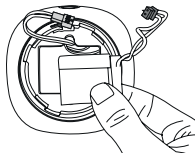

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup přístroje	5 V === 1 A
Rozměry	cca 102 x 102 x 98 mm (bez poutka)
Hmotnost	cca 302 g (bez kabelu USB-C)
<u>Baterie:</u>	
Kapacita	1200 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Označení typu	Lithium-iontová baterie

11. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	10	7. Čistenie a starostlivosť	14
2. Vysvetlenie symbolov	10	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	15
3. Účel použitia	11	9. Likvidácia	15
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	11	10. Technické údaje	16
5. Popis prístroja	13	11. Záruka	16
6. Použitie	13		
6.1 Uvedenie do prevádzky	13		
6.2 Začiatok používania	14		

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo alebo náhradné diely nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 masážny prístroj
- 4 vymeniteľné masážne nadstavce
- 1 USB-C nabíjací kábel

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o výrobku

Odkaz na dôležité informácie



Prečítajte si pokyn



Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu

	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Štítko pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Jednosmerný prúd
	Prípojka USB-C
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Symbol importéra
	Trieda ochrany III

3. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený výlučne na masáž jednotlivých častí tela psov a mačiek. Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie. Prístroj NIE je určený na lekárske alebo komerčné použitie.

Prístroj nepoužívajte, ak sa na vášho psa/mačku vzťahuje jedno alebo viaceré z nasledujúcich výstražných upozornení. Ak si nie ste istý, či je pre vášho psa/vašu mačku prístroj vhodný, poraďte sa s veterinárom.

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo udusení obalovým materiálom! Obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí a vášho psa/mačky.
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo na viditeľné poškodenie. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Prístroj nepoužívajte na ľuďoch.
- V prípade zranenia vášho psa/mačky sa pred použitím prístroja poraďte so svojím veterinárnym lekárom.
- Prístroj nepoužívajte, ak vy alebo váš pes/mačka trpíte kožnými problémami.
- Prístroj nepoužívajte na opuchnuté, popálené, zapálené alebo zranené časti kože a tela.
- Prístroj nepoužívajte na tvári (očiach), na hrtane alebo inej obzvlášť citlivej časti tela.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti srdca.
- Prístroj používajte výlučne s masážnymi nastavcami.
- Prístroj používajte len na mäkkých plochách vášho psa/mačky. Nemasírujte jedno miesto nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd.
- Nebezpečenstvo pomliaždenia! Počas použitia držte prsty mimo pohyblivých masážnych nastavcov.
- Počas použitia držte vlasy mimo pohyblivých masážnych nastavcov, aby sa nezachytili.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, vytiahnite ho po jeho použití zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Chráňte prístroj pred dlhším priamym slnečným žiarením, extrémnym teplom alebo vriacou vodou.
- Vyhýbajte sa abrazívnym čistiacim prostriedkom a výrobkom na starostlivosť, ktorých základ tvorí oxid hlinitý alebo silikón.

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumujú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Oprava

VAROVANIE

Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.

Nebezpečenstvo požiaru

VAROVANIE

V prípade nesprávneho používania, resp. používania v rozpore s týmto návodom na použitie, existuje za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru! Prístroj preto nikdy nepoužívajte bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti a nikdy ho nezakrývajte, napr. dekou alebo vankúšom.

Manipulácia

POZOR

- Po každom použití a pred každým čistením prístroj vypnite.
- Dávajte pozor, aby sa na prístroji nezachytily vlasy.
- Zabráňte kontaktu so špicatými alebo ostrými predmetmi.
- Prístroj chráňte pred tepelnými zdrojmi v prílišnej blízkosti, ako sú sporáky, vykurovacie telesá alebo priamym slnečným žiarením.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

VAROVANIE

Uistite sa, že prístroj ani kábel neprichádzajú do styku s vodou, parou ani inými tekutinami. Prístroj preto používajte len v suchých vnútorných priestoroch (napr. nikdy vo vani, saune). Prístroj nepoužívajte, ak prístroj alebo príslušenstvo vykazujú viditeľné poškodenia. Prístroj nevystavujte otrasom a nenechajte ho spadnúť na zem.

POZOR

Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

UPOZORNENIE

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie uvedených bodov môže mať za následok zranenia osôb, prehriatie, vytečenie, odvetranie, prasknutie, výbuch alebo požiar.
- Na nabíjanie vždy používajte správny alebo dodaný nabíjací kábel.
- Vyhnite sa trvalému nabíjaniu alebo prebíjaniu. Po nabití vytiahnite zástrčku nabíjačky.
- Používajte len s príslušným sieťovým adaptérom.
- Prístroj nabíjajte pod dohľadom a dávajte pozor na tvorbu tepla, deformácie a exhalácie. V prípade pochybností proces nabíjania prerušte.
- Chybné batérie/nabíjací kábel/nabíjačku ihneď odborne zlikvidujte (pozri kapitolu Likvidácia).
- Nevyhadzujte prístroj ani batérie do ohňa.

- Prístroj alebo batérie nikdy nevybíjajte násilím, nezohrievajte, nerozoberajte, neotvárajte, nedrhte, nedeformujte, nekladajte do púzdra, neupravujte ani nevystavujte nárazom.
- Nikdy neskratujte batérie a konektory prístroja napájaného z batérie.
- Chráňte prístroj alebo batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým teplom a vodou.
- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvaľín a plynov.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie/nabíjací kábel/nabíjačku.
- Vždy používajte správny typ batérií. Obráťte sa na zákaznícky servis, aby ste zistili, či je možné vymeniť náhradný diel batérie.
- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Batérie uchovávajú mimo dosahu detí a vášho psa/mačky. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltnutie môže spôsobiť ťažké vnútorné popáleniny a smrť.
- Nikdy nedovoľte deťom meniť batérie bez dozoru dospelého osoby.

⚠ POZOR

- Náhradné časti batérie uchovávajú mimo dosahu kovových predmetov, v dobre vetraných, suchých a chladných priestoroch.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Batérie uchovávajú mimo dosahu vody.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.

UPOZORNENIE

- Prístroj obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti batérie je potrebné zariadenie riadne zlikvidovať (pozri kapitolu Likvidácia).

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1 Slučka na prst
- 2 Kryt batérie
- 3 Tlačidlo ZAP./VYP.
- 4 Masážne nadstavce
- 5 Prípojka USB-C
- 6 USB-C nabíjací kábel

6. POUŽITIE

6.1 Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím musíte prístroj úplne nabíť 100 minút. Doba prevádzky úplne nabitého prístroja je cca 165 minút.

Postupujte pritom takto:

1. Pripojte USB-C nabíjací kábel **6** do USB-C zdierky **5** a vhodného sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
2. Zastrčte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Tlačidlo ZAP./VYP. **3** bliká počas nabíjania nabitelo (pozri obrázky **B** na výklopné strane 3).

UPOZORNENIE

Prístroj počas nabíjania nepoužívajte.

3. Keď tlačidlo ZAP./VYP. **3** svieti nabitelo, batéria je úplne nabitá. Keď vytiahnete USB nabíjací kábel z prístroja, tlačidlo ZAP./VYP. **3** zhasne. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.



Keď je kapacita batérie menej ako 20 %, začne tlačidlo ZAP./VYP. [3] blikaf. V režime „pomalej rýchlosti“ začne blikaf nabiele – v režime „rýchlej rýchlosti“ začne blikaf namodro. Prístroj disponuje automatickým vypínaním a po 15 minútovej prevádzke sa automaticky vypne.

6.2 Začiatok používania

1. Na zapnutie prístroja podržte tlačidlo ZAP./VYP. [3] stlačené 2 sekundy.

↳ Tlačidlo ZAP./VYP. [3] začne blikaf na bielo. Masážne nadstavce začnú rotovať.

2. Prístroj disponuje pomalým a rýchlym rýchlostným stupňom. Krátkym stlačením tlačidla ZAP./VYP. môžete prepínať [3] medzi obidvoma rýchlostnými stupňami.

↳ Farba tlačidla ZAP./VYP. [3] zobrazuje aktuálny rýchlostný stupeň:

- biela = pomalá rýchlosť
- modrá = rýchla rýchlosť

3. Teraz pomaly priblížte svojho psa/mačku k prístroju, aby si zvykol/-a na prístroj a aby sa odstránili prípadné obavy alebo strachy.

4. Po čase navyknutia prejdite prístrojom cez ošetrované miesto na psí/mačky. Prístroj používajte len na mäkkých plochách vášho psa/mačky. Nemasírujte jedno miesto nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd.

⚠ POZOR

Ak pes/mačka pociťuje nepríjemné pocity alebo vykazuje prejavy nevoľnosti, okamžite prerušte použitie.

5. Prístroj vypnite po každom použití. Na vypnutie prístroja držte 2 sekundy stlačené tlačidlo ZAP./VYP. [3].

↳ Tlačidlo ZAP./VYP. [3] zhasne. Masážne nadstavce už nerotujú.

6. Prístroj po použití uchováajte v originálnom obale. Prístroj nenechávajte nezakrytý.

⚠ VAROVANIE

Prístroj vždy uchováajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie masážnych nadstavcov

UPOZORNENIE

Masážne nadstavce [4] čistite výlučne ručne. Masážne nadstavce NEUMÝVAJTE v umývačke riadu ani v práčke.

Masážne nadstavce [4] po každom použití predčistite nasledovne:

1. Rukou odskrutkujte štyri masážne nadstavce [4] z prístroja.
2. Masážne nadstavce čistite pod tečúcou vodou.
3. Nechajte masážne nadstavce úplne vyschnúť.
4. Naskrutkujte štyri úplne vysušené masážne nadstavce späť na prístroj.

Čistenie prístroja

- Nikdy nečistite prístroj čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi alkohol, benzín alebo acetón. Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
- Prístroj môžete čistiť mäkkou a mierne navlhčenou utierkou. Prístroj opäť používajte až po úplnom vyschnutí.

⚠ POZOR

Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak do prístroja vnikla voda, nepoužívajte ho, kým kompletne nevyschne.

Uchovávanie

Prístroj po použití vždy skladujte v originálnom balení a bez zafarbenia. Prístroj vždy uchováajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

8. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť	Uistite sa, že ste pri zapínaní dostatočne dlho a pevne zatlačili tlačidlo ZAP./VYP. Prístroj nabíjate podľa popisu v návode na použitie. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznický servis.

9. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



Ekologická likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia vám odporúčame likvidovať jednotlivé komponenty, najmä batérie, oddelene.


1.

Kryt priehradky na batérie **2** otvoríte tak, že ho rukami uchopíte a otočíte v smere hodinových ručičiek.




2.

Po otvorení krytu priehradky na batérie by ste mali vidieť červeno-čierne kábel a (biely) konektor, ktorým sa napájanie prístroja reguluje cez batériu.

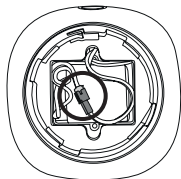


3.

Oddelte navzájom zástrčkové spoje. Ak nevidíte biely zástrčkový spoj, je možné, že sa počas prevádzky zošmykol do telesa prístroja.

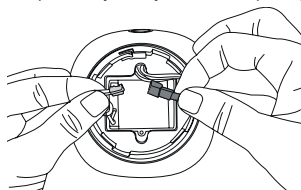

4.

Vytiahnite batériu z prístroja. Všetky komponenty odborné zlikvidujte.

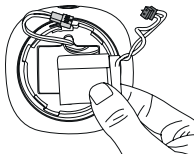

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup prístroja	5 V === 1 A
Rozmery	cca 102 x 102 x 98 mm (bez pútka)
Hmotnosť	cca 302g (bez USB-C kábla)
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Menovité napätie Typové označenie	1200 mAh 3,7 V Litium-iónová batéria

11. ZÁRUKA

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

Omyl a zmeny vyhradené



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



105.24_PP410_2024-11-26_01_IM2_BEU_CZ_SK