



CZ Odsávačka mateřského mléka
Návod k použití





Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Vysvětlení symbolů	3
2. K seznámení	3
3. Použití v souladu s určením	4
4. Pokyny	4
5. Popis přístroje	6
6. Uvedení do provozu	7
6.1 Sestavení odsávačky mateřského mléka	8
6.2 Čištění a sterilizace odsávačky mateřského mléka	9
7. Obsluha	9
7.1 Tipy pro lepší tok mateřského mléka	9
7.2 Obsluha odsávačky mateřského mléka	9
7.3 Obsluha odsávačky mateřského mléka	11
7.4 Obsluha ruční odsávačky	12
7.5 Skladování mateřského mléka	12
7.6 Krmení mateřským mlékem	13
8. Co dělat v případě problémů?	13
8.1 Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	14
9. Likvidace	14
10. Technické údaje	15
11. Síťový adaptér	16

Obsah balení

- Odsávačka mateřského mléka (jednotka motoru)
- Silikonové hadičky se spojovací dílem pro oboustranné odsávání
- Silikonová hadička pro jednostranné odsávání
- 2x nástavec na odsávačku se silikonovou membránou a silikonovým ventilem
- 2x silikonový polštářek (běžná velikost)
- 2x lahvička
- 2xšroubovací uzávěr na lahvičku
- Silikonová savička
- Víčko lahvičky
- Ruční odsávačka
- 2x držák lahvičky
- 2x adaptér pro lahvičky Avent nebo NUK
- Taška
- Síťová zástrčka
- 4x baterie AA
- Tento návod k použití










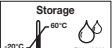





Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchové terapie a péče o krásu a dítě. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. Vysvětlení symbolů

V návodu jsou použity následující symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití
	Příložná část typu BF
	Stejnoseměrný proud
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Výrobce
	Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu
	Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při skladování
IP 21	Ochrana proti vniknutí cizích těles $\geq 12,5$ mm a proti svisle kapající vodě.
	Uvádí, že obal podle nařízení 1935/2004 obsahuje produkty, které jsou určeny k tomu, aby přicházely do styku s potravinami.
	Sériové číslo
	Značka CE potvrzuje shodu se základními požadavky směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.
	Katalogové číslo výrobce
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá ochranné třídě 2.

2. K seznámení

Pomocí odsávačky mateřského mléka BY 70 si mohou kojící ženy jednoduše a v pohodlí doma odsávat mateřské mléko. Pokud nejsou prsa kojících žen dostatečně vyprazdňována, může to vést k bolestivému

městnání mléka, které se může v nejhorším případě vyvinout v zánět prsu (mastitida). Pomocí odsávačky mateřského mléka lze zabránit městnání mléka cíleným odsáváním mateřského mléka.

Odsávačky mateřského mléka navíc poskytují úlevu i v případech rozpraskaných nebo poraněných bradavek. Pomocí zabudované stimulační funkce můžete rovněž povytáhnout ploché nebo vpadlé bradavky, čímž se usnadní následné odsávání mateřského mléka. Odsávačka mateřského mléka vám rovněž umožní uchovávat mateřské mléko v lahvi, např. na cestách nebo pokud musíte miminko na delší dobu opustit. Odsávačkou mateřského mléka lze rovněž poskytnout mateřské mléko miminkům, která ze zdravotních důvodů (předčasný porod, rozštěp patra) nemohou sát přímo z prsu matky.

3. Použití v souladu s určením

Odsávačku mateřského mléka používejte výhradně k odsávání mateřského mléka z prsou kojících žen. Odsávačku mateřského mléka nepoužívejte u zvířat! Odsávačka mateřského mléka je určena pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.

Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

4. Pokyny

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyny

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Drobné díly nenechávejte v dosahu dětí.
- Dbejte na to, aby kabely a hadičky nebyly v dosahu dítěte.
- Používejte pouze síťový adaptér dodávaný spolu s přístrojem.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a užívatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Za síťový kabel netahejte, nekruťte s ním a nelámejte ho.
- Před uvedením odsávačky do provozu se ujistěte, že technické údaje na síťovém adaptéru souhlasí s technickými údaji na jednotce motoru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zástrčky v případě provozních poruch, před čištěním a není-li přístroj používán.
- Odsávačka mateřského mléka se nesmí dostat do kontaktu s předměty, které mají horký povrch nebo ostré hrany.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- Odsávačku mateřského mléka používejte z hygienických důvodů pouze u jedné osoby. Nedělte se o odsávačku s ostatními kojícími matkami.
- Odsávačku mateřského mléka lze používat pouze na prsou kojících žen.
- Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka, pokud se cítíte ospale nebo během spánku.
- Při režimu oboustranného odsávání „2“ můžete používat pouze příslušnou spojku hadiček se spojovacím dílem pro 2 lahvičky.
- Nikdy nepoužívejte odsávačku mateřského mléka ve vaně ani ve sprše.
- V případě chybné funkce nebo provozní poruchy odsávačku v žádném případě neotvírejte ani s ní netřeste. Přečtěte si kapitolu „Co dělat v případě problémů“, pokud zde váš problém nebude popsán, obraťte se na zákaznický servis nebo na prodejce.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní prodejci. V žádném případě nesmíte odsávačku mateřského mléka sami otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit její správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Nikdy nevkládejte odsávačku mléka do vody.
- Na odsávačku mléka nikdy nesahejte vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Nesahejte pro odsávačku mléka, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér odsávačky mléka ze zásuvky, pokud spadne do vody.
- Pokud používáte odsávačku mateřského mléka, položte ji na stabilní a rovnou plochu.

- Zcela rozviňte síťový kabel, abyste zabránili přehřátí.
- Nepokládejte odsávačku mateřského mléka a síťový adaptér nikdy do mikrovlnné trouby.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud odsávačku mléka nepoužíváte. Odsávačku mateřského mléka nenechávejte v zásuvce.
- Jestliže dojde k poškození síťového kabelu odsávačky mateřského mléka, musíte ho odstranit.
- Nikdy neohřívejte mateřské mléko v mikrovlnné troubě, protože by se mohlo nerovnoměrně ohřát a dítě by se mohlo při jeho pití spálit.
- Udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Tento přístroj nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- U odsávačky mateřského mléka není potřeba provádět kalibraci.
- Odsávačku mateřského mléka a příslušenství je zakázáno upravovat.

POZOR

- Nikdy nevlhčete odsávačku mateřského mléka vodou. Není chráněna proto stříkající vodě a kapalinám.
- Udržujte odsávačku mateřského mléka v dostatečné vzdálenosti od elektromagnetického pole, protože může dojít k elektromagnetické interferenci a mohlo by nastat negativní ovlivnění její funkce.
- Odsávačku mateřského mléka a příslušenství chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotou, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
- Netahejte za hadičky odsávačky mateřského mléka.
- Síťový adaptér nevytahujte ze zásuvky za kabel.

POZOR

Pokyny pro přepravu lahvičky

- Při přepravě mateřského mléka v lahvičce (např. za jízdy nebo na cestách), dbejte na to, aby byl uzávěř lahvičky vždy pevně zašroubovaný.



VAROVÁNÍ

Pro bezpečnost vašeho dítěte!

- Děti mohou tento přístroj používat pouze pod dohledem dospělých.
- Neustálé a delší sání tekutin savičkou způsobuje kazy.
- Nepoužívejte savičky ke krmení ani jako dudlík.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu.
- Před každým použitím přístroj zkontrolujte a roztáhněte savičku do všech stran.
- Při prvním náznaku poškození či opotřebení ji odstraňte.
- Nevystavujte savičku přímému slunečnímu záření a horku a nepokládejte ji do dezinfekčního přípravku („sterilizačního roztoku“) déle, než je nutné, protože to může vést k poškození savičky.
- Udržujte savičku v dostatečné vzdálenosti od sladkých látek, které by mohly způsobit vznik kazů.
- Nepoužívejte žádné abrazivní látky nebo antibakteriální čističe.
- Sterilizujte všechny součásti, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, ve vařící vodě po dobu pěti minut.
- Přístroj před každým použitím vyčistěte.
- Dbejte na to, aby tekutina v lahvičce neměla nikdy teplotu nad 50 °C.


VAROVÁNÍ

Pokyny pro zacházení s bateriemi

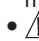- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
-  Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarit plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
-  Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.


- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

5. Popis přístroje

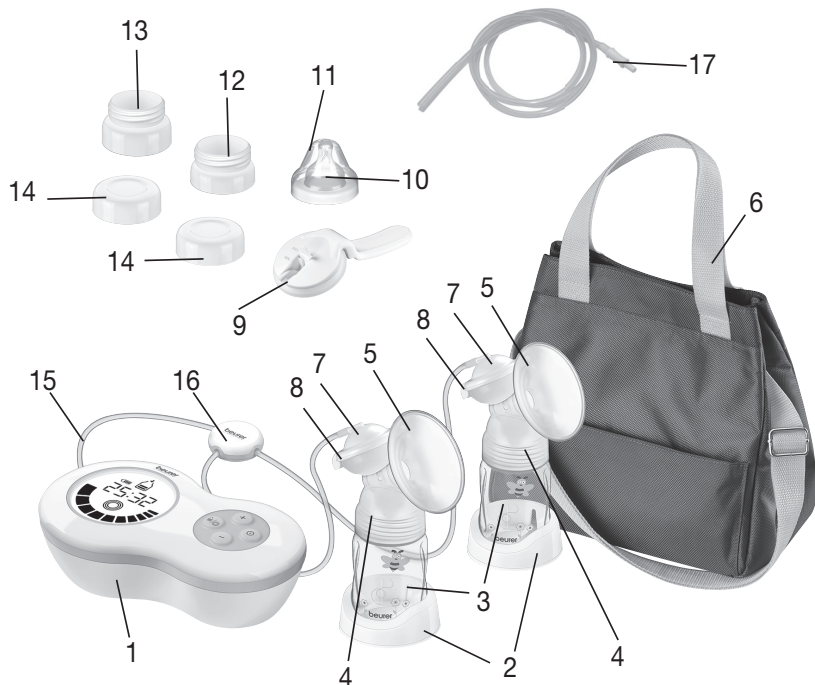

1. Odsávačka mateřského mléka s displejem	10. Savička
2. Držák lahvičky	11. Víčko lahvičky
3. Lahvička (180 ml)	12. Adaptér pro lahvičku NUK(odsávačku mateřského mléka můžete používat i s touto lahvičkou)
4. Silikonový ventil	13. Adaptér pro lahvičku AVENT (odsávačku mateřského mléka můžete používat i s touto lahvičkou)
5. Silikonový polštářek (běžná velikost)	14. Šroubovací uzávěr na lahvičku
6. Taška	15. Silikonová hadička pro režim oboustranného odsávání
7. Nástavec odsávačky včetně víčka se silikonovou membránou a silikonovým ventilem	16. Spojovací díl pro silikonovou hadičku s režimem oboustranného odsávání
8. Silikonová membrána	17. Hadička pro jednostranné odsávání
9. Rukojeť ruční odsávačky se 2 stupni	

Popis displeje a tlačítek

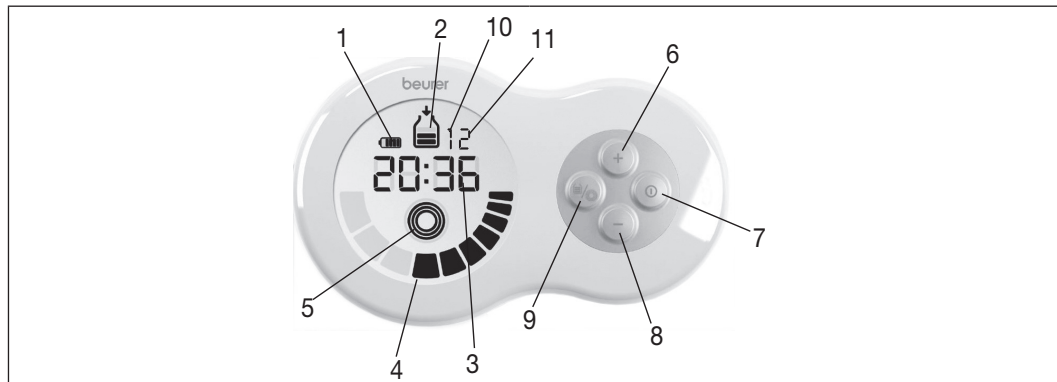

1. Stav baterií (při provozu bez síťové zástrčky)	7. Vypínač
2. Režim odsávání (mateřské mléko se odsává)	8. Tlačítko – (snížení úrovně stimulace nebo odsávání)
3. Zobrazení času (odpočítávání stimulace / délky používání režimu odsávání)	9. Tlačítko REŽIM (střídání mezi režimem odsávání a stimulace)
4. Úroveň stimulace nebo odsávání	10. Nastavení pro jednostranné odsávání (současné stisknutí + a –)
5. Režim stimulace (prsí bradavka je stimulována, mateřské mléko se neodsává)	11. Nastavení pro oboustranné odsávání (současné stisknutí + a –)
6. Tlačítko + (zvýšení úrovně stimulace nebo odsávání)	






6. Uvedení do provozu

Upozornění

Zkontrolujte, zda je odsávačka mateřského mléka uložena v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

6.1 Sestavení odsávačky mateřského mléka

Po vyjmutí odsávačky mateřského mléka z obalu zkontrolujte především případné praskliny plastových obalů, aby elektrické komponenty nebyly nechráněně vystaveny kapalinám.
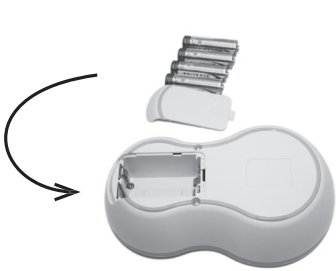
<p>1. Našroubujte na lahvičku nástavec odsávačky. Dbejte na to, aby byl nástavec lahvičky pevně nasazen, aby tekutina nemohla vytékat.</p>	
<p>2. Nasuňte silikonové hadičky pro oboustranné odsávání do 2 nástavců odsávačky a do odsávačky</p>	
<p>3. Pro jednostranné odsávání zasuněte silikonovou hadičku do nástavce odsávačky a do odsávačky</p>	
<p>4. Propojte odsávačku mléka se síťovým kabelem a zasuněte síťovou zástrčku do zásuvky.</p>	
<p>5. Odsávačku mateřského mléka můžete alternativně provozovat také s bateriemi. Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně jednotky motoru. Vložte čtyři baterie AA (jsou součástí balení). Bezpodmínečně dbejte na to, aby byly baterie vloženy podle označení se správným pólováním. Dbejte na grafické znázornění v přihrádce na baterie. Poté přihrádku na baterie uzavřete tak, aby slyšitelně a znatelně zapadla do správné polohy. Se 4 novými, plně nabitými bateriemi bude přístroj fungovat při nejvyšším nastavení cca 60 minut.</p>	

6.2 Čištění a sterilizace odsávačky mateřského mléka

VAROVÁNÍ

Sterilizujte a čistěte jednotlivé komponenty odsávačky mateřského mléka (s výjimkou jednotky motoru a silikonové hadičky), které se dostanou do přímého kontaktu s mateřským mlékem, samostatně před prvním a každým dalším použitím! Nikdy nesterilizujte jednotku motoru!

Pro správnou sterilizaci odsávačky mateřského mléka postupujte podle následujících bodů:

1. Vyšroubujte z lahvičky nástavec odsávačky.
2. Vytáhněte z nástavce odsávačky a z jednotky motoru silikonovou hadičku.
3. Odstraňte z nástavce odsávačky silikonovou membránu a silikonový ventil.
4. Sterilizujte lahvičky a nástavce odsávačky (se silikonovou membránou a silikonovým ventilem) po dobu pěti minut ve vroucí vodě nebo pomocí parního sterilizátoru. Odsávačku mléka znovu použijte teprve tehdy, až budou všechny součásti suché. Nepoužívejte antibakteriální čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plast odsávačky mléka.
5. Vyčistěte jednotku motoru opatrně pouze lehce navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. V žádném případě nesmíte jednotku motoru umývat pod vodou, protože by se do ní mohla dostat kapalina a poškodit ji. Pokud odsávačku mléka nehodláte delší dobu používat, vyjměte z ní baterie.



7. Obsluha


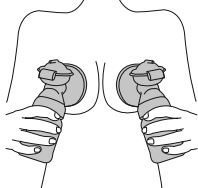














7.1 Tipy pro lepší tok mateřského mléka

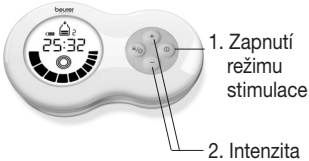- Zvolte pro odsávání místo, kde se můžete co nejvíce uvolnit.
- Zvolte pro odsávání dobu, kdy se můžete co nejvíce uvolnit.
- Má-li matka své dítě u sebe nebo se dívá na jeho fotografii, má to pozitivní vliv na tok mléka.
- Pokud kojíte dítě z jednoho prsu, použijte současně odsávačku mléka u druhého prsu.
- Teplo a pohoda podporují tok mateřského mléka. Používejte odsávačku mléka po sprše nebo po koupeli.
- Pokud jsou vaše prsa nateklá nebo vás bolí, položte na ně na několik minut teplou utěrku. Má to příznivý vliv na tok mléka.
- Pokud z prsou ihned neteče mateřské mléko, pokuste se uvolnit a zkuste to znovu o několik minut později.
- Pokud pomocí odsávačky mateřského mléka ani po pěti minutách neteče z prsou žádné mateřské mléko, přerušte aplikaci a zkuste to později ještě jednou.
- Pokud vám používání odsávačky mléka působí silné bolesti, obraťte se na lékaře.

7.2 Obsluha odsávačky mateřského mléka

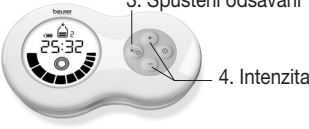


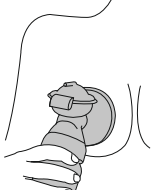










a) Příprava oboustranného odsávání:


<p>1. Před používáním si umyjte důkladně ruce a prsa.</p>	
<p>2. Pro oboustranné odsávání musí být odsávačka spojena silikonovou hadičkou se 2 lahvičkami.</p>	


<p>3. Posadte se tak, aby vaše horní část těla byla mírně ohnuta dopředu. Pro lepší podporu zad můžete použít polštář.</p>	
<p>4. Umístěte prsní kloboučky se silikonovým polštářkem opatrně na prsa. Dbejte na to, aby byly pokryty celé prsní bradavky a aby nevznikaly vzduchové bubliny. Pro zajištění bezchybné funkce musí být prsní kloboučky pevně přisáté k prsu.</p>	
<p>5. Odsávačku mateřského mléka zapnete stisknutím tlačítka  . Po prvním zapnutí se software odsávačky nachází v režimu oboustranného odsávání „2“. Tento režim byste měli nastavovat vždy při oboustranném odsávání. Odsávačka mléka začne nyní automaticky běžet v režimu stimulace  a na displeji se objeví 2minutové odpočítávání. Po tuto dobu 2 minut budou vaše prsní bradavky stimulovány, čímž se připraví na odsávání mateřského mléka. Pomocí tlačítek  /  nastavte požadovanou intenzitu stimulace.</p>	
<p>6. Po uplynutí 2 minut začne na displeji blikat  . Pro zahájení odsávání mateřského mléka stiskněte tlačítko  . Pomocí tlačítek  /  nastavte intenzitu odsávání tak, aby byla pro vás příjemná. Jakmile bude v lahvičkách 180 ml mateřského mléka, přerušte aplikaci.</p>	
<p>7. Pokud chcete znovu přepnout do režimu stimulace, stiskněte tlačítko  . Stimulace a 2minutové odpočítávání začne běžet od začátku.</p> <p> Odsávačka mateřského mléka má zabudovanou funkci „Memory“, to znamená, že jakmile zapnete odsávačku, bude aktivní poslední nastavená úroveň stimulace, odsávání.</p> <p>Nezapomeňte: Nastavení pro jednostranný režim odsávání „1“ i oboustranný režim odsávání „2“ se ukládají do paměti. Při oboustranném režimu odsávání „2“ musí být spojovací díl pro oboustranné odsávání propojen s jednotkou motoru.</p>	
<p>8. Odsávačku mateřského mléka vypnete stisknutím tlačítka  .</p>	

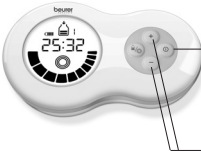7.3 Obsluha odsávačky mateřského mléka

b) Příprava jednostranného odsávání:

<p>1. Před používáním si umyjte důkladně ruce a prsa.</p>	
<p>2. Pro jednostranné odsávání musí být odsávačka spojena silikonovou hadičkou s 1 lahvíčkou.</p>	
<p>3. Posadte se tak, aby vaše horní část těla byla mírně ohnuta dopředu. Pro lepší podporu zad můžete použít polštář.</p>	
<p>4. Umístěte prsní klobouček se silikonovým polštářkem opatrně na prso. Dbejte na to, aby byla pokryta celá prsní bradavka a aby nevznikaly vzduchové bubliny. Pro zajištění bezchybné funkce musí být prsní klobouček pevně přisátý k prsu.</p>	
<p>5. Odsávačku mateřského mléka zapnete stisknutím tlačítka . Stiskněte tlačítka + a -, držte je asi 2 sekundy stisknutá, dokud se přístroj nenastaví do režimu pro jednostranné odsávání „1“. Odsávačka mléka začne nyní automaticky běžet v režimu stimulace  a na displeji se objeví 2minutové odpočítávání. Po tuto dobu 2 minut bude vaše prsní bradavka stimulována, čímž se připraví na odsávání mateřského mléka. Pomocí tlačítek  /  nastavte požadovanou intenzitu stimulace.</p>	 <p>1. Zapnutí režimu stimulace</p> <p>2. Intenzita</p>
<p>6. Po uplynutí 2 minut začne na displeji blikat . Pro zahájení odsávání mateřského mléka stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítek  /  nastavte intenzitu odsávání tak, aby byla pro vás příjemná. Jakmile bude v lahvičce 180 ml mateřského mléka, přerušte aplikaci.</p>	 <p>3. Spuštění odsávání</p> <p>4. Intenzita</p>

7. Pokud chcete znovu přepnout do režimu stimulace, stiskněte tlačítko . Stimulace a 2minutové odpočítávání začne běžet od začátku.

 Odsávačka mateřského mléka má zabudovanou funkci „Memory“, to znamená, že jakmile zapnete odsávačku, bude aktivní poslední nastavená úroveň stimulace, odsávání.



5. Zpět do režimu stimulace


8. Odsávačku mateřského mléka vypnete stisknutím tlačítka .

7.4 Obsluha ruční odsávačky


1. Sejměte víčko s možností připojení k odsávačce mateřského mléka a použijte rukojeť ruční odsávačky včetně silikonové membrány tak, že natlačíte silikonovou membránu pevně na nástavec odsávačky, přičemž úchytka musí zapadnout do správné polohy.



2. Pak umístěte prsní klobouček se silikonovým polštářkem opatrně na prso. Dbejte na to, aby byla pokryta celá prsní bradavka a aby nevznikaly vzduchové bubliny. Pro zajištění bezchybné funkce musí být prsní klobouček pevně přisátý k prsu. Používejte ruční odsávačku podle nákresu.

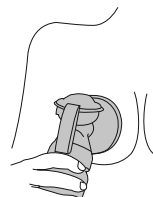

3. Sílu odsávání můžete zvolit pomocí viditelných značek MIN/MAX.

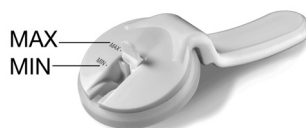

7.5 Skladování mateřského mléka

Odsáté mateřské mléko můžete určitou dobu skladovat v chladničce nebo v mrazničce.

- Chcete-li skladovat mateřské mléko, dbejte na to, aby byly odsávačka a lahvičky před použitím dezinfikovány. Mateřské mléko skladujte výhradně v dezinfikovaných nádobách.
- Chcete-li skladovat mateřské mléko, dejte jej po odsátí ihned do chladničky nebo mrazničky. Nenechávejte mateřské mléko stát při pokojové teplotě.
- Chcete-li mateřské mléko skladovat v mrazničce, doporučujeme lahev opatřit datem odsátí.

VAROVÁNÍ

Bezpodmínečně dodržujte doby trvanlivosti uvedené v následující tabulce:

	POKOJOVÁ TEPLOTA	CHLADNIČKA (cca 3–5 °C)	MRAZNIČKA (cca -16 °C)
Čerstvě odsáté mateřské mléko	trvanlivost 6 hodin	trvanlivost 24 hodin (Neskladujte ve dveřích chladničky, protože zde není dostatečně chladno)	trvanlivost 3 měsíce
Rozmrazené mateřské mléko (které bylo dříve zmrazené)	ihned spotřebujte	10 hodin	Znovu nezmrazujte!

7.6 Krmení mateřským mlékem

Upozornění

Ke krmení dítěte mateřským mlékem můžete používat přiložené lahvičky se silikonovou savičkou. Alternativně můžete odsávat mateřské mléko i s lahvičkami NUK nebo Avent a pak s nimi krmit dítě. (Vhodné adaptéry pro lahvičky NUK/Avent jsou součástí balení.)

- Dříve, než přelijete skladované mateřské mléko před krmením do lahvičky, dbejte na to, aby byla lahvička dezinfikována.
- Při rozmrazování zmrazeného mateřského mléka nechejte mléko přes noc v chladničce. Tímto způsobem zůstanou zachovány živiny. Jakmile se mateřské mléko rozmrazí, musí být do 24 hodin spotřebováno. Rozmrazování mateřského mléka v teplé vodě by mělo probíhat pouze v mimořádně naléhavých případech.
- Pokud mateřské mléko nepříjemně zapáchá, ihned jej zlikvidujte.
- Nikdy neohřívejte mateřské mléko v mikrovlnné troubě, protože by se mohlo nerovnoměrně ohřát a dítě by se mohlo při jeho pití spálit.
- Při ohřevu mateřského mléka zkontrolujte teplotu mléka, než jej bude dítě pít.

8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Možná řešení
Odsávačka mléka nesaje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda jsou díly odsávačky mléka správně navzájem složeny.• Zkontrolujte, zda je nástavec odsávačky správně přiložen k prsu.
Nedochází k odsávání mateřského mléka.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je silikonová hadička správně nasazena, zda není nastavena síla odsávání na minimum a zda je zapnuta odsávačka.• Přesvědčte se, že se v silikonovém ventilu nenacházejí zbytky mléka, které by mohly omezit tok mléka.
Odsávání mateřského mléka způsobuje bolesti.	<ul style="list-style-type: none">• Pokuste se uvolnit a zkuste to znovu. Čím větší praxi budete mít, tím lépe se vám bude odsávání mateřského mléka dařit.• Snižte nastavenou sílu odsávání tlačítkem minus.• Přesvědčte se, že se v silikonovém ventilu nenacházejí zbytky mléka, které mohou tok mléka omezit.• Poradte se s lékařem, pokud by se bolesti zhoršily.

Problém	Možná řešení
Mateřské mléko vytéká pod silikonovým polštářkem.	<ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte silikonový polštářek a nasadte jej znovu. Dbejte na to, aby byl silikonový polštářek správně umístěn a aby nástavec odsávačky pevně dosedal. • Předkloňte se horní polovinou těla mírně dopředu.
Některá ze součástí odsávačky mateřského mléka se změnila nebo je poškozená.	<ul style="list-style-type: none"> • Nepoužívejte žádné žíravé či plynné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. • V některých případech mohou silné výkyvy teplot poškodit plast odsávačky mateřského mléka. • Pokud bude jedna ze součástí poškozena, odsávačku již nepoužívejte.
Odsávačku mateřského mléka nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je odsávačka mateřského mléka řádně složena a zapnuta. • Ujistěte se, že je síťový adaptér správně propojený s odsávačkou mateřského mléka.

8.1 Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Výrobek	Číslo položky
Nástavec odsávačky včetně silikonového polštářku (běžná velikost), silikonové membrány, silikonového ventilu, silikonové hadičky a lahvičky se šroubovým uzávěrem	953.15
Lahvička se savičkou a víčkem lahvičky	163.719
Adaptér pro lahvičku Avent a NUK	163.720
2 silikonové polštářky (malý a normální)	163.721
Rukojeť ruční odsávačky včetně silikonového polštářku (běžná velikost)	163.722
Stojánek na lahvičku	163.723

9. Likvidace

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrných pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.



Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.





10. Technické údaje

Model	BY 70
Type	BY 40
Napájení	4x baterie 1,5 V AA (alkalické baterie)
Napětí (vstup)	100-240V (AC~) 50/60Hz
Napětí (výstup)	6V (DC ---) 1,0A
Rozměry	168 × 100 × 53 mm
Hmotnost	310 g (bez baterií)
Maximální sací výkon	0,32 barů
Přípustné provozní podmínky	+5 °C až +40 °C, relativní vlhkost vzduchu (nekondenzující) 30 až 85 %, vnější tlak 700–1 060 hPa
Přípustné podmínky pro uložení	-20°C až +60°C, relativní vlhkost vzduchu (nekondenzující) 10 až 95%, vnější tlak 700–1 060 hPa
Očekávaná životnost	500 hodin
Intervalové použití	30 minut ON / 30 minut OFF
Třída ochrany	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a odpovídá ochranné třídě 2. 
Elektromagnetická kompatibilita podle normy EN 60601-1-2	
Bezpečnostní požadavky podle normy EN 60601-1	
Výrobky pro péči o dítě – Vybavení pro pití podle normy EN 14350	
Přístroj k odsávání mateřského mléka	
Přístroj s jemným vakuem a malou možností toku	
Příložná část typu BF	
Přístroj k použití v nepřítomnosti vznětlivých nebo jedovatých plynových směsí nebo oxidu dusného (rajský plyn) 	

Změny technických údajů bez předchozího oznámení jsou z důvodu aktualizace vyhrazeny

Tento přístroj odpovídá evropské normě EN 60601-1-2 a podléhá zvláštním preventivním opatřením, která se týkají elektromagnetické kompatibility. Nezapomeňte prosím, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na tento přístroj. Přesnější údaje si můžete vyžádat na uvedené adrese zákaznického servisu nebo přečíst na konci návodu k použití.

11. Síťový adaptér

Model č.	LXCP12-06
Vstup	100–240 V, 50–60 Hz 0,3 A max
Výstup	6V DC, 1 A
Výrobce	Shenzhen Longxc Power Supply Co., LTD
	Polarita přípojky stejnosměrného napětí
	Ochranná izolace / třída ochrany 2
Pouzdro a ochranné kryty	Kryt adaptéru chrání před dotykem části, které se nacházejí či mohou nacházet pod proudem (prsty, jehlička, kontrolní háčky). Uživatel se nesmí současně dotýkat pacienta a výstupní zástrčky síťového adaptéru (AC/DC).