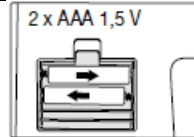
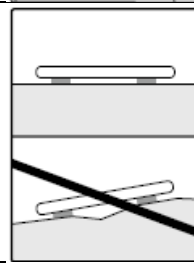

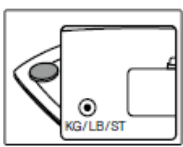



# Beurer PS 25 - Osobná váha

## Návod na použitie / Návod k použití


### 1. Uvedenie do prevádzky / Uvedení do provozu

SK - Vložte batériu alebo odstráňte izolačný prúžok. CZ – Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.		
SK - Postavte váhu na pevný a rovný podklad. CZ – Postavte váhu na pevný a rovný podklad.		
SK - Váhu možno prepínať. CZ – Váhu je možné přepínat.		

### 2. Váženie / Vážení



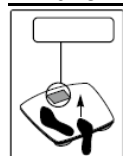


Quickstart

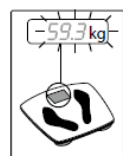



SK - Postavte sa na váhu  
CZ - Postavte se na váhu.

SK - Počas váženia stojte pokojne!  
CZ – Během vážení stůjte klidně!

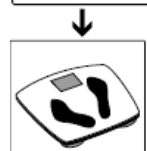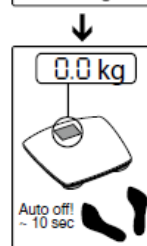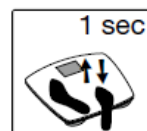


Upozornenie / Upozornění:  
SK - V prípade prvého použitia a zmeny miesta.  
CZ – V případě prvního použití a změny místa.

### 3. Chybové hlásenia / Chybová hlášení

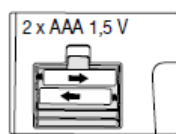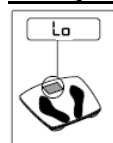


Vybité batérie / Vybité baterie.

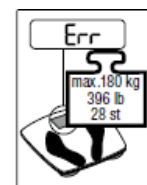

Prekročenie maximálnej nosnosti / Překročení maximální nosnosti.


## SK - Všeobecné pokyny

- Zatažiteľnosť je max. 180 kg (396 lb / 28 st), delenie 100 g (0,2 lb / 1/5 lb).
- Čistenie: Váhu môžete čistiť pomocou navlhčenej handričky, na ktorú môžete podľa potreby naniesť malé množstvo umývacieho prostriedku. Nikdy neponárajte váhu do vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Váhu chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, silnými teplotnými výkyvmi, elektromagnetickými poľami a blízkymi tepelnými zdrojmi.
- Nestavajte z jednej strany na samý okraj váhy: nebezpečenstvo prevrhnutia!
- Obalový materiál udržiajte mimo dosahu detí!
- Nie je určené pre komerčné použitie.
- Ak budete mať ďalšie otázky k používaniu našich prístrojov, obráťte sa prosím na Vášho predajcu alebo na zákaznícky servis.
- Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte batérie a prípadne ich vymeňte.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servisy alebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a úplne vybité batérie a akumulátory sa odpratané do špeciálne označených zberných nádob, do zberní nebezpečného odpadu alebo do špecializovaných elektro predajní. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.
- Upozornenie: Na batériách s obsahom škodlivín sa nachádzajú nasledujúce symboly:  
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.
- Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade s nariadením o elektrických a elektronických starých prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na príslušný komunálny úrad, kompetentný vo veci likvidácie odpadov.

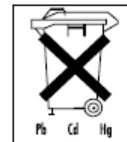

## CZ - Všeobecné pokyny

- Zatižitelnost je max. 180 kg (396 lb / 28 st), dělení 100 g (0,2 lb / 1/5 lb).
- Čištění: Váhu můžete čistiť pomocí navlhčeného hadříku, na kterou můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhu do vody. Nikdy ji také neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
- Nestavte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převržení!
- Obalový materiál udržiajte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznícky servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět pouze zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Použité a zcela vybité baterie a akumulátory se odklizeny do speciálně označených sběrných nádob, do sběren nebezpečného odpadu nebo do specializovaných elektro prodejen. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivin se nacházejí následující symboly:  
Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.
- Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.

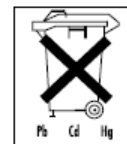

## KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO / KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK / Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

### BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)

