

# beurer

## MG 80

CZ



**CZ Masážní přístroj**  
**Návod k použití**

## Vážená zákaznice, vážený zákazník,

jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Naše jméno stojí za hodnotnými a důkladně vyzkoušenými výrobky vysoké kvality z oblasti teplé, jemné terapie, diagnózy krevního tlaku, tělesné teploty, hmotnosti, masáže a vzduchu. Důkladně si prosím přečtete návod k použití a respektujte jeho pokyny.

S přátelským doporučením  
Váš tým společnosti Beurer


## 1. Důležitá upozornění

### Uchovat pro další použití a zpřístupnit ostatním uživatelům!

- Připojte přístroj pouze na síťové napětí, které je uvedené na typovém štítku.
- Jako každý elektrický přístroj, tak i tento masážní přístroj je třeba užívat pozorně a opatrně, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
  - Síťový kabel vypněte bezprostředně po použití.
  - Zabráňte jakémukoliv kontaktu s vodou (mimo čištění lehce navlhčeným hadříkem!). Voda se nikdy nesmí dostat dovnitř přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad umyvadlem s vodou. V případě, že voda přesto vnikla dovnitř, okamžitě odpojte přístroj od sítě a obraťte se na svého prodejce elektro nebo zákaznický servis.
  - Přístroj a především síťový kabel je potřeba před každým použitím zkontrolovat, jestli případně není poškozený.
  - Při poškození síťového kabelu v žádném případě nezapojujte do sítě. obraťte se na svého prodejce elektro nebo zákaznický servis.
  - Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis nebo autorizovaný prodejce.
  - Nedržte a nenoste přístroj za kabel.
  - V případě, že se při používání vyskytne porucha, přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj je určený k účelu popsaném v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo neodpovědným používáním.
- Používejte pouze masážní nástavce dodané s přístrojem
- Přístroj je určen pouze k osobnímu používání, nikoliv pro medicínské nebo komerční účely.
- Nepoužívejte přístroj bez přerušení déle než 15 minut, abyste zabránili přehřátí. Pře dalším použitím nechte přístroj vychladnout.
- Povrchová plocha přístroje se při používání zahřívá. Osoby málo citlivé na teplo si musí dávat zvláště pozor.
- Nikdy nezakrývejte zapnutý přístroj (dekou, poduškou,...)
- Nikdy neuvádějte přístroj do provozu bez dozoru, obzvláště jsou-li blízko děti.
- Děti, nemohoucí a postižené osoby mohou přístroj uvádět do provozu pouze pod dozorem dospělých osob, nebo musí být předem s přístrojem seznámeny.
- Nepoužívat u malých zvířat / zvířat.
- Osoby s kardiostimulátorem musí používání masážního přístroje konzultovat se svým lékařem a v žádném případě nemasírovat oblast srdce.

- Příklad nikdy nepoužívat na opuchlých, popálených nebo poraněných místech na pokožce nebo na těle. Mimo jiné se nesmí masírovat: kosti (např. klouby, páteř), hlava nebo jiné citlivé části těla.
- Při nachlazení a zvýšené teplotě, křečových žilách, trombózách, zápalech žil, cukrovce, v těhotenství, nervových onemocněních (např. ischias) nebo akutních zápalech nevykonávejte masáž. V těchto případech zkontrolujte použití se svým lékařem.
- Nepoužívejte přístroj v posteli. Během používání nesmíte usnout.

## 2. Popis přístroje

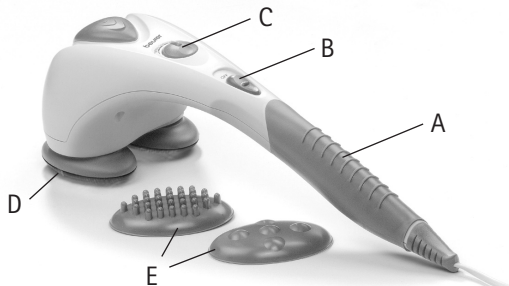

- A Protismyková rukojeť
- B Posuvný spínač:  
OFF – vypnout  
M – masáž  
MH – masáž a infračervené ohřívání
- C Regulátor (plynule nastavitelná masážní rychlost)
- D Masážní plocha s infračerveným ohříváním
- E Vyměnitelné masážní nástavce:  
- nástavec s hrbolky  
- pětibodový nástavec

## 3. Použití

Účel použití: Příklad slouží výhradně k masáži lidského těla.

Přesvědčte se, že je přístroj před tím, než dáte kabel do sítě, vypnutý.

Posuvným spínačem zapněte přístroj na „M“ – „pouze masáž“ nebo „MH“ – „masáž s infračerveným ohříváním“.

Regulátorem nastavte požadovanou masážní rychlost.

Přiložte přístroj jednou nebo oběma rukama k části těla, kterou chcete masírovat. Můžete stát, sedět, nebo ležet a masírovat sebe či jinou osobu. Silným nebo slabším stisknutím masážního přístroje můžete měnit intenzitu masírování. Nemasírujte jedno místo na těle déle než 3 minuty a potom přejděte na jinou partii.

Po maximálně 15 minutách používání znovu přístroj vypněte a nechte ho vychladnout.

Skladujte přístroj v suchu.

## 4. Čištění/Likvidace

Vypnutý a vychladlý přístroj čistěte pouze pomocí zlehka navlhčeného hadříku. Můžete použít i jemný čisticí prostředek. Dávejte však pozor na to, aby se dovnitř přístroje nikdy nedostala voda. Používejte přístroj znovu až tehdy, je-li úplně suchý.

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



