


beurer

HK 60
Cosy Grey

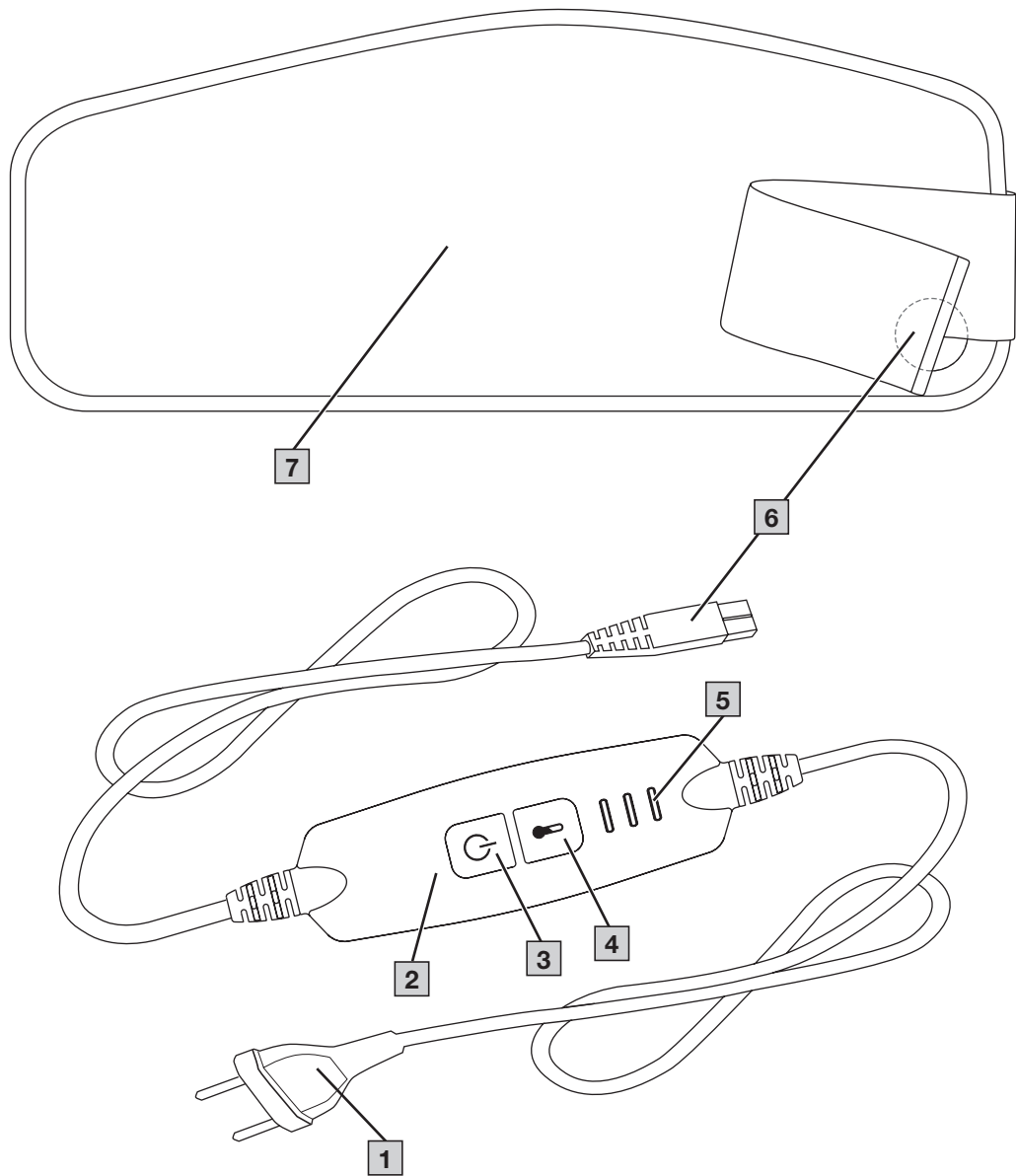

- CS** Multifunkční vyhřevná poduška
Návod k použití 3
- SK** Multifunkčná poduška na vyhrievanie
Návod na použitie 7



 Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

Výhřevná poduška včetně spínače je v dalším textu označována pouze jako přístroj.

Výhřevná poduška bez spínače je v dalším textu označována pouze jako vyhřívací prvek.

Obsah

1. Obsah balení	3	6.4 Nastavení teploty	6
2. Vysvětlení symbolů	3	6.5 Automatika vypnutí	6
3. Bezpečnostní pokyny	4	6.6 Vypnutí	6
4. Použití v souladu s určením	5	7. Čištění a údržba	6
5. Popis přístroje	5	8. Co dělat v případě problémů?	6
6. Ovládání	5	9. Skladování	6
6.1 Bezpečnost	5	10. Likvidace	6
6.2 Uvedení do provozu	5	11. Technické údaje	6
6.3 Zapnutí	6	12. Záruka/servis	6

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 vyhřívací prvek
- 1 spínač
- 1 návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.	
	VAROVÁNÍ
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.	
	POZOR
Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.	
	UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.	
	Informace o výrobku
Upozornění na důležité informace	
	Čtěte pokyny
	Nepoužívejte podložku, jestliže je přehnutá nebo složená!
	Do podložky nezapichujte žádné špendlíky!

	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).
	Výrobce
	Přístroj třídy ochrany II
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Označení posouzení shody pro Spojené království
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka
	Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Tento přístroj splňuje přísné požadavky na zdravotní nezávadnost podle certifikace OEKO-TEX® STANDARD 100, jak bylo prokázáno výzkumným ústavem Hohenstein.
	Maximální teplota praní 30 °C velmi jemné praní
	Nebělit
	Nesušit v sušičce prádla (tumbler)
	Nežehlit
	Nečistit chemicky

DŮLEŽITÉ POKYNY – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

▲ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně přístroje. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání přístroje dále.
- Tento přístroj nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné zranitelné osoby, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s chorobnými změnami na kůži nebo s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po požití léků proti bolesti nebo alkoholu).
- Tento přístroj nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem, přičemž spínač musí být vždy nastaven na minimální hodnotu teploty.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tento přístroj není určen pro použití v nemocnicích.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Nevpichujte žádné špendlíky.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je přehnutý nebo složený.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže jste mokří.
- Tento přístroj lze použít pouze ve spojení se spínačem uvedeným na etiketě.
- Tento přístroj se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.
- Jestliže budete přístroj používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná tímto přístrojem mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: intenzita elektrického pole: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Proto se před použitím tohoto přístroje poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Kabel a spínač přístroje mohou při nevhodném umístění představovat riziko zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo ukopnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.

- Tento přístroj je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, přístroj byl nesprávně používán nebo se již nezahřívá, musí být před dalším zapnutím nejprve zkontrolován výrobcem.
- V žádném případě nesmíte přístroj (vč. příslušenství) otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.
- Spínač a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Jestliže je tento přístroj zapnutý, nesmí se na něj pokládat
 - žádné předměty s ostrými hranami,
 - žádné zdroje tepla, např. ohřívací láhev apod.
- Elektronické součástky ve spínači se při používání přístroje zahřívají. Spínač proto nesmí být při používání zakrytý nebo položený na vyhřívacím prvku.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Během skladování na přístroj nepokládáte žádné předměty, aby nedošlo k jeho výraznému ohnutí. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Ovládání, Čištění a údržba, Skladování.
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

4. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

▲ POZOR

Tento přístroj je určen pouze pro zahřívání lidského těla.

Tento přístroj lze používat univerzálně. Například na břicho, zádech, kloubech a šiji. Pro použití v oblasti šiji lze přístroj použít srolovaný.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 2.

- 1 Sítová zástrčka
- 2 Spínač
- 3 Vypínač
- 4 Tlačítko pro nastavení teploty
- 5 Osvětlený ukazatel teplotních stupňů
- 6 Konektorová spojka
- 7 Vyhřívací prvek

6. OVLÁDÁNÍ

6.1 Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ


- Přístroj je vybaven BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato senzorová technologie v případě závady přehřátí vyhřívacího prvku po celé jeho ploše. Pokud BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypnul přístroj, nesvíti již žádné osvětlení spínače ani v zapnutém stavu.
- Upozorňujeme, že po poruše již nelze přístroj z bezpečnostních důvodů používat a je nutné ho zlikvidovat nebo zaslat na uvedenou adresu servisu.
- Vadný vyhřívací prvek v žádném případě nepřipojujete k jinému spínači stejného typu. Vedlo by to rovněž ke konečnému vypnutí bezpečnostním systémem ve spínači.

6.2 Uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že se vyhřívací prvek při používání neshrnula ani se nevytočily žádné záhyby.


1. Nejdříve propojte spínač [2] s vyhřívacím prvkem připojením konektorové spojky [6].
2. Pak zapojte síťovou zástrčku [1] do zásuvky.
3. Přiložte přístroj na břicho nebo na záda. Poté přístroj upevněte k tělu pomocí dlouhého pružného gumového pásku se suchým zipem.

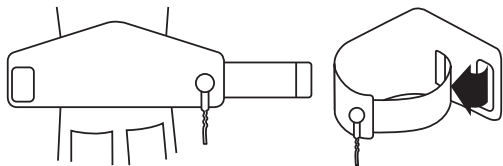

Použití jako vyhřívací poduška na šiji

- Nejdříve spojte konektorovou spojku.
- Potom položte přístroj před sebe na stůl tak, aby se konektorová spojka nacházela vlevo nahoře a špičatá strana přístroje směřovala k tělu
- Pak srolujte přístroj po celé šířce, počínaje špičatou stranou.

- Následně umístěte zcela srolovaný přístroj kolem šije a spojte části suchého zipu.
- Přechínavající gumový pásek můžete vpředu zasunout pod přístroj.

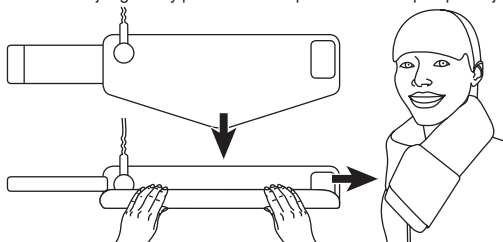

VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby byl přístroj pevně a úplně srolovaný. Jinak by mohl bezpečnostní systém přístroj nezvratně vypnout.

6.3 Zapnutí

Stisknete vypínač [3]. V zapnutém stavu je ukazatel teplotních stupňů [5] osvětlený.



Pořadí spínání: 3-1-2-3-1...

6.4 Nastavení teploty

Pro změnu teploty stiskněte tlačítko pro nastavení teploty [4].

Stupeň 1: minimální teplota

Stupeň 2: střední teplota

Stupeň 3: maximální teplota



Nejrychlejšího zahřátí přístroje dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.



Tento přístroj je vybaven funkcí rychlého zahřátí, která umožňuje rychlejší zahřívání během prvních 10 minut.

6.5 Automatika vypnutí

Tento přístroj je vybavena funkcí automatického vypínání. Zastaví přívod tepla a zobrazení teplotních stupňů cca 90 minut po uvedení do provozu. Pro opětovné uvedení přístroje do provozu stiskněte vypínač [3]. Asi po 5 sekundách můžete přístroj znovu zapnout.

VAROVÁNÍ

Jestliže budete přístroj používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

6.6 Vypnutí

Stiskněte vypínač [3] a vypněte přístroj. Ukazatel teplotních stupňů již nesvíí.



Pokud přístroj nepoužíváte, stiskněte vypínač [3], vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte konektorovou spojku [6], a tím i spínač [2] od vyhřívacího prvku.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte konektorovou spojku, a tím i spínač od vyhřívacího prvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

Spínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění spínače použijte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Drobné znečištění vyhřívacího prvku můžete odstranit navlhčenou utěrkou a v případě potřeby trochou tekutého jemného čisticího prostředku.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na to, že se vyhřívací prvek nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo zehlit. V opačném případě může dojít k poškození vyhřívacího prvku.

- Vyhřívací prvek prát v pračce.
- Perte pouze se zavřeným suchým zipem. Jinak by se mohl vyhřívací prvek nebo jiné textilie poškodit.
- Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dodržujte dávkování podle údajů výrobce.
- Ihned po vyprání vytáhněte ještě vlhký vyhřívací prvek do tvaru původní velikosti, rozložte ho naplocho na stojan na prádlo a nechte ho uschnout.

UPOZORNĚNÍ

- K připevnění vyhřívacího prvku na stojanu nepoužívejte kuličky na prádlo nebo podobné prostředky. V opačném případě může dojít k poškození vyhřívacího prvku.
- Spínač propojte s vyhřívacím prvkem teprve tehdy, když jsou konektorová spojka i vyhřívací prvek úplně suché. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

VAROVÁNÍ

Nikdy nezapínejte přístroj proto, abyste ho vysušili! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

8. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Teplotní stupně nesvíí, ačkoli - je spínač řádně propojen s vyhřívacím prvkem, - je síťová zástrčka připojena k funkční zásuvce, - byl stisknut vypínač [3].
	Možná příčina
	Bezpečnostní systém přístroj nevratně vypnul.
Odstranění	Zašlete vyhřívací prvek a spínač do servisu.

9. SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, doporučujeme ho skladovat v původním obalu. Odpojte konektorovou spojku, a tím i spínač od vyhřívacího prvku.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Viz typový štítek na vyhřívacím prvků.

12. ZÁRUKA/SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.

 **Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.**

Elektrická poduška vrátane spínača sa v ďalšom texte označuje len ako prístroj.

Elektrická poduška bez spínača sa v ďalšom texte označuje len ako vyhrievací prvok.

OBSAH

1. Obsah balenia	7	6.4 Nastavenie teploty	10
2. Vysvetlenie symbolov	7	6.5 Automatické vypnutie	10
3. Bezpečnostné upozornenia	8	6.6 Vypnutie	10
4. Účel použitia	9	7. Čistenie a starostlivosť	10
5. Popis prístroja	9	8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	11
6. Obsluha	10	9. Uchovávanie	11
6.1 Bezpečnosť	10	10. Likvidácia	11
6.2 Uvedenie do prevádzky	10	11. Technické údaje	11
6.3 Zapnutie	10	12. Záruka/servis	11

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 vyhrievací prvok
- 1 spínač
- 1 návod na použitie

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.	
	VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	POZOR
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.	
	UPOZORNENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa poškodiť zariadenie alebo niečo v jeho okolí.	
	Informácia o výrobku Odkaz na dôležité informácie
	Prečítajte si pokyn
	Nepoužívajte zloženú alebo zhrnutú!
	Nezapichávajte ihly

	Nesmú ju používať veľmi malé deti (0 – 3 roky).
	Výrobca
	Trieda ochrany II
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Značka posúdenia zhody Spojeného kráľovstva
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.
	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	Štítok pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Tento prístroj spĺňa vysoké humánno-ekologické požiadavky OEKO-TEX® STANDARD 100, čo potvrdil aj výskumný inštitút Hohenstein.
	Maximálna teplota prania 30 °C veľmi šetrný proces
	Nebielte
	Nesušte v sušičke bielizeň (bubnovej sušičke)
	Nežehlite
	Nečistite chemicky

3. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ POKYNY – USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE

▲ VAROVANIE

- Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení môže mať za následok osobné alebo vecné škody (zásah elektrickým prúdom, kožné popáleniny, požiar). Nasledovné bezpečnostné upozornenia a výstrahy pred nebezpečenstvami slúžia nielen na ochranu vášho zdravia, resp. zdravia iných, ale aj na ochranu prístroja. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné upozornenia a pri postúpení prístroja iným osobám im odovzdajte aj tento návod.
- Prístroj nesmú používať osoby, ktoré nepociťujú teplo ani iné osoby vyžadujúce si ochranu, ktoré nevedia reagovať na prehriatie (napr. diabetici, osoby s určitými kožnými ochoreniami, rozsiahlymi jazvami v oblasti použitia, osoby po požití liekov na tlmenie bolesti alebo alkoholu).
- Tento prístroj sa nesmie používať u veľmi malých detí (0 – 3 roky), pretože tieto nedokážu reagovať na prehriatie.
- Prístroj môžu používať deti, ktoré sú staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom, pričom spínač musí byť vždy nastavený na minimálnu teplotu.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento prístroj nie je určený na používanie v nemocniciach.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Nezapichávajúte ihly.
- Nepoužívajte poskladanú alebo zhrnutú.
- Nepoužívajte za mokra.
- Tento prístroj sa smie používať iba so spínačom uvedeným na etikete.
- Tento prístroj sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na etikete.
- Ak sa prístroj používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

- Elektrické a magnetické polia vychádzajúce z tohto prístroja môžu za určitých okolností ovplyvniť funkciu vášho kardiostimulátora. Hodnoty týchto polí sa však nachádzajú hlboko pod hraničnými hodnotami: intenzita elektrického poľa: max. 5 000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 mT. Pred použitím tohto prístroja sa preto poraďte s lekárom a s výrobcom svojho kardiostimulátora.
- Neťahajte za káble, ani ich nepretáčajte a ostro neohýbajte.
- Kábel a spínač prístroja môžu v prípade nesprávneho umiestnenia predstavovať nebezpečenstvo zachytenia, strangulácie, potknutia alebo zašliapnutia. Používateľ musí zaistiť, aby boli nadbytočné káble a káble všeobecne bezpečne uložené.
- Tento prístroj je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky vyskytnú, prístroj sa používa nesprávne alebo sa už nezohrieva, musí ho pred opätovným zapnutím najskôr skontrolovať výrobca.
- Prístroj (vrátane príslušenstva) nesmiete v žiadnom prípade rozoberať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní zaniká záruka.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.
- Spínače a vedenia nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Keď je tento prístroj zapnutý, nesmú sa naň ukladať
 - predmety s ostrými hranami,
 - žiadne zdroje tepla, ako ohrievacia fľaša alebo podobne.
- Elektronické súčiastky v spínači sa pri používaní prístroja zohrievajú. Spínač sa preto nesmie zakrývať a nesmie byť položený na vyhrievacom prvku, ak je v prevádzke.
- Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. V opačnom prípade sa môže poškodiť.
- Počas skladovania na prístroj nekladte žiadne predmety, aby ste predišli jeho ostrému zlomeniu. Inak sa môže prístroj poškodiť.
- Bezpodmienečne dbajte na pokyny týkajúce sa nasledujúcich kapitol: Obsluha, čistenie a starostlivosť, uchovávanie.
- V prípade otázok týkajúcich sa použitia našich prístrojov sa obráťte na náš zákaznícky servis.

4. ÚČEL POUŽITIA

▲ POZOR

Tento prístroj je určený iba na zohrievanie ľudského tela.

Tento prístroj sa môže používať univerzálne. Napríklad na bruchu, na chrbte, na kĺboch a na šiji. Na použitie v oblasti šije sa môže prístroj používať zvinutý.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 2.

- 1** Zástrčka
- 2** Spínač
- 3** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 4** Tlačidlo nastavenia teploty
- 5** Osvetlený indikátor teplotných stupňov
- 6** Zástrčkové spojenie
- 7** Vyhrievací prvok

6. OBSLUHA

6.1 Bezpečnosť

UPOZORNENIE


- Prístroj disponuje BEZPEČNOSTNÝM SYSTÉMOM. Táto snímacia technika zabráňuje prehriatiu vyhrievacieho prvku po celej ploche prostredníctvom automatického vypnutia v prípade poruchy. Ak BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM vypne prístroj, ani v zapnutom stave už nesvieti žiadne osvetlenie spínača.
- Upozorňujeme, že prístroj nie je v prípade poruchy možné z bezpečnostných dôvodov ďalej používať a je potrebné ho zlikvidovať, alebo ho zaslať na uvedenú servisnú adresu.
- Nikdy nepripájajte chybný vyhrievací prvok k inému spínaču rovnakého typu. To by taktiež viedlo ku konečnému vypnutiu bezpečnostného systému v spínači.

6.2 Uvedenie do prevádzky

UPOZORNENIE


Uistite sa, že sa vyhrievací prvok pri používaní nezhrňa alebo nevytvára záhyby.

1. Najskôr pripojte spínač [2] k vyhrievaciemu prvku tak, že spojíte zástrčkové spojenie [6].
2. Potom zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky [1].
3. Prístroj si potom položte na brucho alebo chrbát. Následne si okolo tela obtočte nafahovateľný gumový pás a zafixujte prístroj zatvorením suchého zipsu.

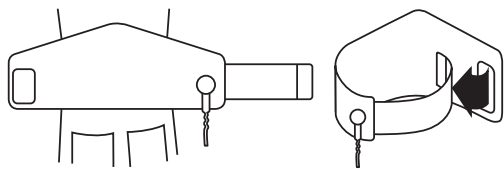

Použitie ako elektrická poduška na šiju

- Najprv spojte zásuvnú spojku.
- Potom položte prístroj pred sebou na stôl tak, aby sa zásuvná spojka nachádzala hore vľavo a zúžená strana prístroja smerovala k telu.
- Potom prístroj tesne zrolujte po celej šírke, pričom začnite zúženou stranou.
- Následne položte úplne zrolovaný prístroj okolo šije a upevnite. Spojte časti so suchým zipsom.
- Presahujúci gumový pás môžete posunúť dopredu pod prístroj.

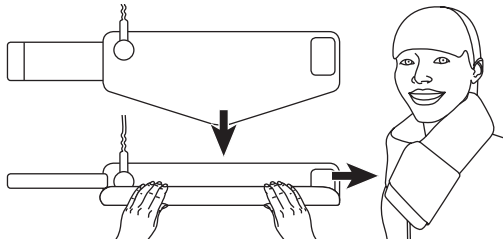

VAROVANIE

Dbajte o to, aby bola prístroj tesne a úplne zrolovaný. Inak sa môže bezpečnostný systém prístroja nenávratne odpojiť.

6.3 Zapnutie

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia [3]. V zapnutom stave je ukazovateľ teplotných stupňov [5] osvetlený.

- Spínacia sekvencia: 3-1-2-3-1...

6.4 Nastavenie teploty

Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo nastavenia teploty [4].

Stupeň 1: minimálna teplota

Stupeň 2: stredná teplota

Stupeň 3: maximálna teplota

- Najrýchlejšie zohriatie prístroja dosiahnete tak, že ho najskôr nastavíte na najvyšší teplotný stupeň.
- Tento prístroj disponuje funkciou rýchleho zahriatia, ktorá vedie k rýchlemu zahriatiu v rámci prvých 10 minút.

6.5 Automatické vypnutie

Tento prístroj je vybavený automatickým vypnutím. Toto zastaví prívod tepla a zobrazenie teplotných stupňov cca 90 minút po uvedení do prevádzky prístroja. Na opätovné uvedenie prístroja do prevádzky stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia [3]. Po približne 5 sekundách je možné opätovné zapnutie.

VAROVANIE

Ak sa prístroj používa viac hodín, odporúčame na spínači nastaviť najnižší teplotný stupeň, aby sa predišlo prehriatiu zohriatej časti tela a prípadnému následnému popáleniu kože.

6.6 Vypnutie

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia [3], aby ste prístroj vypli. Ukazovateľ teplotných stupňov potom už nie je osvetlený.

- Ak prístroj nepoužívate, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia [3] na vypnutie prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové spojenie [6], a tým aj spínač od vyhrievacieho prvku [2].

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

VAROVANIE

Pred čistením vždy najskôr odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne odpojte zástrčkové spojenie, a tým aj spínač od vyhrievacieho prvku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

Spínač nesmie prísť nikdy do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Inak sa môže poškodiť.

- Na čistenie spínača používajte suchú nechlpatú utierku. Na čistenie nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Malé škvrny na vyhrievacom prvku je možné odstrániť navlhčenou utierkou a prípadne s malým množstvom jemného pracieho prostriedku.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že vyhrievací prvok sa nesmie chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke, manglovať ani žehliť. Inak sa môže vyhrievací prvok poškodiť.

- Tento vyhrievací prvok je možné prať v pračke.
- Perte len so zavretým suchým zipsom. V opačnom prípade sa môže vyhrievací prvok alebo iné textilie poškodiť.
- Práčku nastavte na zvlášť šetrný prací program na 30 °C (prací program na vlnu). Používajte jemný prací prostriedok a dávkujte ho podľa údajov výrobcu.

- Hneď po vypraní ešte mokrý vyhrievací prvok rozťahnite na pôvodný rozmer a nechajte ho rozprestreť naplocho vysušiť na sušiacu na bielizeň.

UPOZORNENIE

- Na upevnenie vyhrievacieho prvku na sušiacu na bielizeň nepoužívajte štipce na bielizeň a pod. Inak sa môže vyhrievací prvok poškodiť.
- Spínač pripojte k vyhrievaciemu prvku až vtedy, keď sú zástrčkové spojenie a vyhrievací prvok kompletne vyschnuté. Inak sa môže prístroj poškodiť.

VAROVANIE

Prístroj v žiadnom prípade nezapínajte za účelom vysušenia! V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

8. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Teplotné stupne nie sú osvetlené, hoci - je spínač kompletne spojený s vyhrievacím prvkom, - je sieťová zástrčka zapojená do funkčnej zásuvky, - tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 bolo stlačené.
Možná príčina	Bezpečnostný systém nenávratne vypol prístroj.
Odstránenie	Vyhrievací prvok a spínač zašlite do servisu.

9. UCHOVÁVANIE

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho uskladniť v originálnom obale. Na tento účel odpojte zástrčkové spojenie a tým aj spínač vyhrievacieho prvku.

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o  odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pozri typový štítok na vyhrievacom prvku.

12. ZÁRUKA/SERVIS

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

